

**Delta-Cast®**

# Sortimentskatalog Stützverbände

Einfach. Innovativ. Individuell.



**Delta-Cast®**  
We know casting.

Wie verwenden Sie die Lesezeichen im Inhaltsverzeichnis?

Um aus dem Inhaltsverzeichnis auf die gewünschte Produktseite zu kommen, klicken Sie einfach auf die Kategorie, die Unterkategorie oder direkt auf das Produkt, das Sie sich ansehen möchten.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Kategorie</b>      | <b>S.XX</b>  |
| <b>Unterkategorie</b> | <b>S. XX</b> |
| Produkt               | S. XX        |

Durch einfaches Klicken auf die jeweilige Seite können Sie auch Seite für Seite durch die Sortimentsübersicht blättern.

Um zum Inhaltsverzeichnis zurück zu kommen, klicken Sie auf den Button unten auf der Seitenmitte.

↑

Zurück zur Sortimentsübersicht

@

Des Weiteren sind sämtliche Internet- und E-Mail-Adressen verlinkt, sodass Sie mit einem einfachen Klick unseren Service nutzen können.

# Sortimentsübersicht

## | Schienen und Cast-Verbände

### Fertigschienensystem

Delta-Xpress™ S. 08

### Synthetische Schienen-Verbände

Dynacast® Prelude S. 10  
Dynacast® AS S. 12  
Dynacast® Prelude Strap Kits S. 13

### Glasfaserfreie Cast-Verbände

Delta-Cast® Conformable S. 14  
Delta-Cast® Elite S. 16  
Delta-Cast® Elite Longetten S. 16  
Delta-Cast® Soft S. 18  
Delta-Cast® Prints S. 20  
Delta-Cast® Mischpackungen S. 22

### Glasfaser Cast-Verbände

Delta-Lite® Conformable S. 24  
Delta-Lite® Plus S. 25  
Delta-Lite® Plus Longetten S. 25

## | Naturgips-Verbände

### Naturgips-Verbände

Platrix® S. 28  
Biplatrix® S. 29  
Specialist® E S. 30

## | Polsterwatten und Schlauchverbände

### Punktuelle Polsterung

S. 34

### Wasserfeste Polsterwatte und Schlauchverbände

Delta-Dry® Softliner S. 37  
Delta-Dry® Polsterwatte S. 39

## Polsterschlauchverbände

Delta Terry-Net™ S S. 40  
Delta Terry-Net™ C S. 41

## Trikotschlauchverbände

Tricofix® S. 42  
Delta-Net® Stockinette S. 43

## Polsterwatten

Artiflex® S. 44  
Artiflex® Soft S. 44  
Artiflex® Natur S. 44  
Delta-Rol® S S. 45  
Delta-Rol® S. 46  
Specialist® S. 47

## Polsterzubehör

Tensoban® S. 48  
Krepppapierbinde S. 49

## | Gehhilfen und Zubehör

### Gehhilfen

Artistep® S S. 52

### Zubehör

Delta Terry-Net™ Filzpolster S. 53  
Delta Terry-Net™ Schaumpolster S. 54  
Delta Terry-Net™ Randpolster S. 55  
Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System S. 56  
Elastomull® haft/Elastomull® haft color S. 57

### Orientierungshilfe zur Produktauswahl

S. 58

### Service und Schulungen

S. 60

02 Delta-Cast® Sortimentskatalog Stützverbände



Delta-Cast® Sortimentskatalog Stützverbände 03

# Sortimentskatalog Stützverbände

Für Ihre Frakturversorgung - alles aus einer Hand

Die Behandlung von Frakturen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten im Klinik- und Praxisalltag. **Delta-Cast®** ist Ihr Partner für den Alltag im Cast-Raum und hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Sie bei der Anlage von **Starr- und Stützverbänden** bestmöglich mit fortschrittlichsten Produkten zu unterstützen.

Das Sortiment der Stützverbände bietet individuelle Lösungen, die Ihnen vor allem eine einfache, funktionelle und verlässliche Applikation ermöglichen. Der hohe Tragekomfort sorgt zudem dafür, dass auch Ihren Patienten der Umgang mit **Starr- und Stützverbänden** so angenehm wie möglich gemacht und die Compliance erhöht wird.

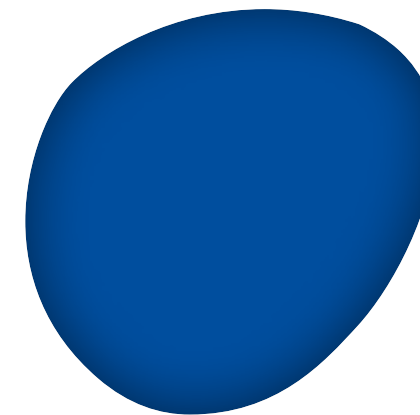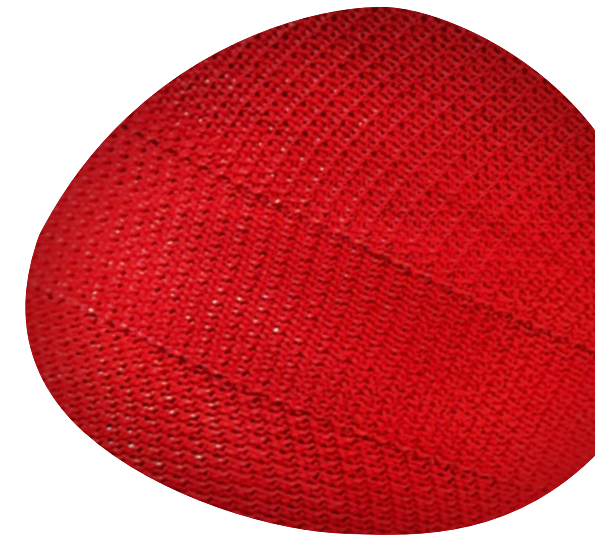

# Schienen und Cast-Verbände

Zur Behandlung von Frakturen und Weichteilverletzungen jeglicher Art werden rigide bzw. flexible zirkuläre Verbände und Schienen eingesetzt. Darüber hinaus finden sie auch in der modernen Art der Immobilisierung, der „**Funktionellen-Cast-Therapie**“ (FCT), Anwendung.

Dafür bietet **Delta-Cast®** für jeden Abschnitt der Therapie, von der Akutphase bis hin zur Rehabilitationsphase, die richtigen Produkte für jeden Anwendungsfall. Sie überzeugen durch ihr geringes Gewicht, ihre individuelle Farbgebung, ihre Stabilität sowie ihre Verlässlichkeit.

Die Produkte der **Delta-Cast®** und **Delta-Lite®** Reihe zeichnen sich insbesondere durch ihre ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit sowie durch einen exzellenten Lagenverbund aus. Damit gewährleisten sie neben einer einfachen Applikation vor allem eine sichere Immobilisierung.

**Hinweis für alle Cast-Verbände:** Für ein optimales Ergebnis achten Sie bitte darauf, dass die Tauchwassertemperatur 20 °C bis 25 °C entspricht. Auf diese Weise ergibt sich eine offene Zeit von 3–5 Minuten. Voll belastbar ist der Cast-Verband nach 20 Minuten.



# Produktübersicht

## Fertigschienensystem

|               |       |
|---------------|-------|
| Delta-Xpress™ | S. 08 |
|---------------|-------|

## Synthetische Schienen-Verbände



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Dynacast® Prelude            | S. 10 |
| Dynacast® AS                 | S. 12 |
| Dynacast® Prelude Strap Kits | S. 13 |

## Glasfaserfreie Cast-Verbände

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Delta-Cast® Conformable     | S. 14 |
| Delta-Cast® Elite           | S. 16 |
| Delta-Cast® Elite Longetten | S. 16 |
| Delta-Cast® Soft            | S. 18 |
| Delta-Cast® Prints          | S. 20 |
| Delta-Cast® Mischpackungen  | S. 22 |

## Glasfaser Cast-Verbände

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Delta-Lite® Conformable    | S. 24 |
| Delta-Lite® Plus           | S. 25 |
| Delta-Lite® Plus Longetten | S. 25 |

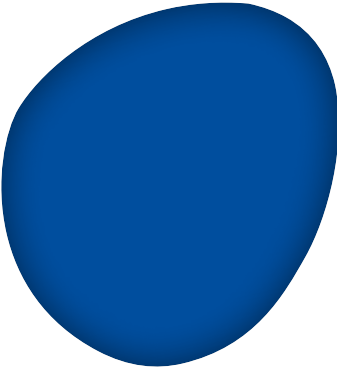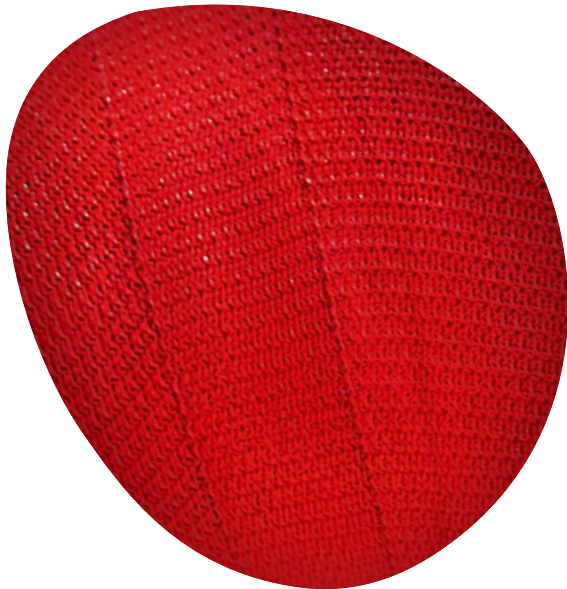

# Delta-Xpress™

## Die innovative Art der kurzfristigen Immobilisierung

**Delta-Xpress™** ist ein innovatives Fertigschienensystem für die schnelle, einfache und sichere Immobilisierung. Ob als Erstversorgung in der Akutphase, als postoperative Versorgung oder zur Weiterleitung in die weiterführende Diagnostik oder zu Spezialisten – **Delta-Xpress™** ist immer die optimale Lösung.

**Material:** Innovativer Verbundstoff  
**Beschichtung:** Weiches Vliesmaterial

### Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Interimsversorgung
- Intuitives, fehlerfreies Anlegen
- Sichere Immobilisierung
- Individuell zuschneidbar
- Sofortige Funktionsstellung bietet Sicherheit
- Unterstützt die Schmerzreduktion
- Minimale Lagerkapazität

### Anwendungsgebiete

- Akute Verletzungen aller Extremitäten in der allerersten Behandlungsphase
- Frakturen jeglicher Art
- Weichteilverletzungen wie z. B. Schnittwunden
- Quetschungen
- Distorsionen
- Verletzungen am Bandapparat

### Anwendungsdauer

kurzzeitig



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



RÖNTGEN-TRANSPARENT



Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung mit Delta-Xpress™.

### Passform

Passform bei Bedarf mit einer Schere individuell zuschneidbar



| Delta-Xpress™ Handgelenkschiene |           |               |          |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                       | Abmessung | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7271200                         | S         | 10/10         | 03969322 |
| 7271201                         | M         | 10/10         | 09533330 |
| 7271202                         | L         | 10/10         | 09533353 |

| Delta-Xpress™ Handgelenkschiene mit Fingerauflage |           |               |          |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                         | Abmessung | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7271300                                           | S         | 10/10         | 03969339 |
| 7271301                                           | M         | 10/10         | 09533376 |
| 7271302                                           | L         | 10/10         | 09533382 |

### Fixierungshinweis

Zur Fixierung wird eine kohäsive Binde (**Elastomull® haft/Elastomull® haft color** siehe S. 57 ) empfohlen.

| Delta-Xpress™ Ellenbogenschiene |           |               |          |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                       | Abmessung | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7271000                         | S         | 10/10         | 09531420 |
| 7271001                         | M         | 10/10         | 09533169 |
| 7271002                         | L         | 10/10         | 09533175 |

| Delta-Xpress™ Unterschenkelschiene |           |               |          |
|------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                          | Abmessung | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7271100                            | S         | 10/10         | 09533181 |
| 7271101                            | M         | 10/10         | 09533198 |
| 7271102                            | L         | 10/10         | 09533206 |

# Die Produktfamilie von Delta-Xpress™

## Die verlässliche Lösung für alle Fälle



**100-prozentige Röntgentransparenz** erleichtert die Diagnostik



**Weiches Vliesmaterial** gewährleistet hohen Komfort und Feuchtigkeitsausgleich



Die **Passform** ist bei Bedarf mit einer Schere individuell zuschneidbar



**Offene Konstruktion** ermöglicht einen einfachen Zugang zu Wunden



**Hohe Luftdurchlässigkeit** hilft Hautirritationen vorzubeugen



**Integrierte Messleiste** und **Farbcode** dienen der schnellen Größenermittlung


### Handgelenkschiene

Das Handgelenk kann einfach in Funktionsstellung gebracht und stabilisiert werden. Die Verstärkung durch eine Kunststoff-schiene bietet maximale Stabilität.



### Handgelenkschiene mit Fingerauflage

Der 100°-Winkel unterstützt das Mittelhandgelenk und stabilisiert das Handgelenk in 30°-Dorsalextension.

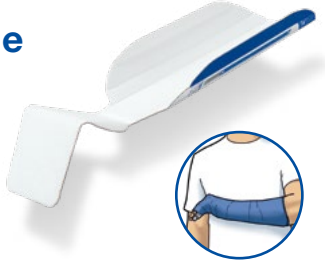

### Unterschenkelschiene

Fußeinlage und selbstklebende Malleolarpolsterung sorgen für erhöhten Tragekomfort. Der vordefinierte 90°-Winkel und die Aussparung im Fersenbereich sorgen für eine ideale Stellung des Unterschenkels, Fußknöchels und Fußes.



### Ellenbogenschiene

Der 90°-Winkel und die Aussparung im Ellenbogenbereich sorgen für eine sichere Stellung von Oberarm, Ellenbogen und Unterarm.



## Sieger im Röntgenbildvergleich: die Delta-Xpress™ - Produktfamilie



Delta-Xpress™



Delta-Xpress™



SAM Splint



Cramerschiene



Korkschiene



Weißgips

# Dynacast® Prelude

## Schienenversorgung auf höchstem Niveau

**Dynacast® Prelude** ist ein einfach zu handhabendes und extrem vielseitiges Schienensystem. Das Geheimnis des einlagigen Glasfaserkerns liegt in der patentierten 3D-Strick-Technologie. Dadurch lässt sich die doppelseitig gepolsterte Schiene beim Anlegen extrem gut anformen. **Dynacast® Prelude** – der einzigartige „splint to go“.

**Material:** Glasfasergewebe  
**Beschichtung:** Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Einlagiger Glasfaserkern mit 3D-Gewebestruktur bietet Sicherheit
- Perfekte Anpassungsfähigkeit
- Einfaches Zuschneiden
- Durch beidseitige Polypropylenpolsterung vielseitig einsetzbar
- Faltenfreie Anlage

### Anwendungsgebiete

Teilweise oder vollständige Ruhigstellung bei:

- Distorsionen
- Weichteil-, Kapsel- oder Bandverletzungen
- Sehnenverletzungen
- Frakturen
- Zur Stützung von Weichteilverletzungen und Fissuren

### Anwendungsdauer


Einige Tage bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung mit Dynacast® Prelude.

## Geringere Reinigungszeit\*

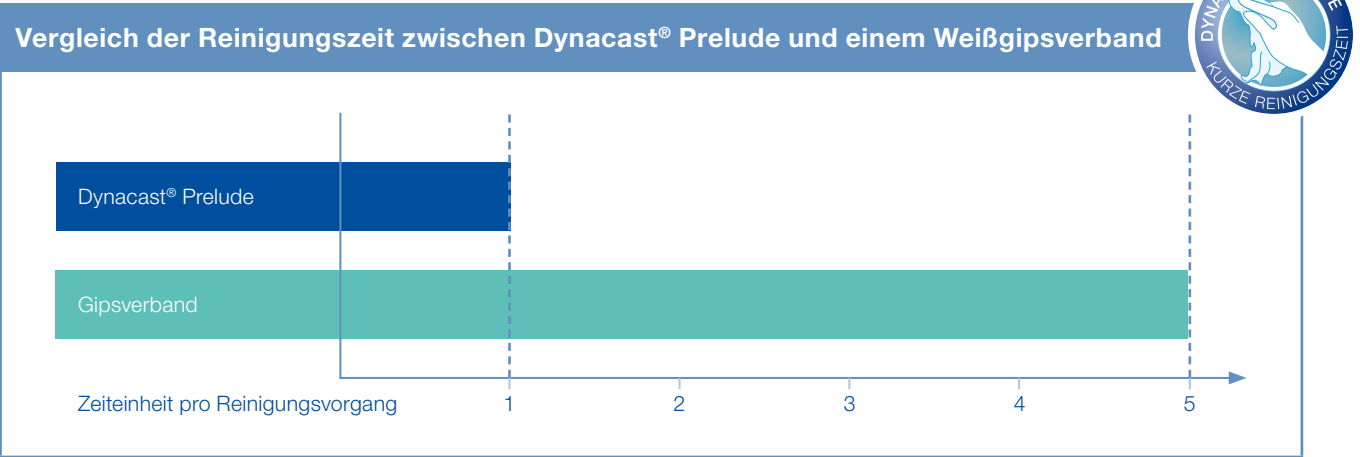

| Dynacast® Prelude, Rollenware |                 |               |          |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                     | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7141800                       | 2,5 cm x 4,6 m  | 1/2           | 07465788 |
| 7142000                       | 5,0 cm x 4,6 m  | 1/2           | 07465794 |
| 7142100                       | 7,5 cm x 4,6 m  | 1/2           | 07465802 |
| 7141500                       | 10,0 cm x 4,6 m | 1/2           | 07465819 |
| 7141600                       | 12,5 cm x 4,6 m | 1/2           | 07465765 |
| 7141700                       | 15,0 cm x 4,6 m | 1/2           | 07465771 |
| 7141900                       | 20,0 cm x 2,3 m | 1/2           | 00816629 |

Hinweis: Für das Fixieren von Dynacast® Prelude eignet sich besonders die kohäsive Fixierbinde Elastomull® haft/color (siehe S. 57) oder alternativ die Dynacast® Prelude Strap Kits (siehe S. 13)

| Dynacast® Prelude Splints, vorgeschnitten |                   |               |          |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                 | Abmessung         | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7286900                                   | 5,0 cm x 25,0 cm  | 5/20          | 02405787 |
| 4722200                                   | 7,5 cm x 30,0 cm  | 5/20          | 01869036 |
| 4722300                                   | 7,5 cm x 40,0 cm  | 5/20          | 01869160 |
| 4722400                                   | 10,0 cm x 30,0 cm | 5/20          | 01869094 |
| 4722500                                   | 10,0 cm x 40,0 cm | 5/20          | 01869220 |
| 4722600                                   | 10,0 cm x 76,0 cm | 4/16          | 01869243 |
| 4722700                                   | 12,5 cm x 65,0 cm | 4/16          | 01869131 |
| 4723500                                   | 12,5 cm x 76,0 cm | 4/16          | 01869289 |

# Dynacast® AS

## Die Sprunggelenkschiene mit der individuellen Passform

**Dynacast® AS** ist eine individuell modellierbare, leichte und komfortable Sprunggelenkschiene. Durch die Klettbandfixierung ist **Dynacast® AS** unter dem Fuß größenverstellbar.

**Material:** Glasfasermaterial mit Polyurethanbeschichtung und mikroperforierter Schaumpolsterung

**Vorteile auf einen Blick**

- Passt in fast jeden Schuh
- Frühfunktionelle Behandlung
- Kontrollierte Bewegungseinschränkung
- Atmungsaktiv
- Hämatombehandlung / Kältetherapie möglich

**Anwendungsgebiete**

- Ruhigstellung & Entlastung des oberen Sprunggelenkes
- Kontrollierte Ödembehandlung
- Unterstützung der Rehabilitationsphase
- Förderung einer frühen Wiedereingliederung in den Alltag

**Anwendungsdauer**

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Dynacast® AS, Komplettsset |                    |               |          |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                  | Abmessung          | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7136100                    | Größe S/M ≤ 165 cm | 1/6           | 00738958 |
| 7136000                    | Größe M/L ≥ 165 cm | 1/6           | 00738964 |

| Dynacast® AS, 10er-Packung |                    |               |          |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                  | Abmessung          | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7283400                    | Größe S/M ≤ 165 cm | 10/10         | 02728125 |
| 7283500                    | Größe M/L ≥ 165 cm | 10/10         | 02728119 |

# Dynacast® Prelude Strap Kits

## Das spezielle Klettverschluss-System

Das **Dynacast® Prelude Strap Kits** Klettverschluss-System macht aus einer herkömmlichen Schienenversorgung eine nahezu perfekt angepasste, individuelle Orthese. Das **Dynacast® Prelude Strap Kits** Klettverschluss-System wird direkt auf der Polsterung der zuvor angepassten und ausgehärteten **Dynacast® Prelude** Schiene befestigt.

**Material:** Dehnbare Velstretch® Bänder

**Vorteile auf einen Blick**

- Vereinfacht das Anlegen von Schienen
- Komfortabel für Anwender und Patient
- Selbst. Schienenabnahme durch den Patienten möglich (z. B. für Rehabilitationsmaßnahmen)

**Anwendungsgebiete**

- Für Funktionelle-Splint-Therapie (FST) und Rehabilitationsphase (z. B. Muskelaufbau, Hydrotherapie)

**Anwendungsdauer**

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Dynacast® Prelude Strap Kits, obere Extremitäten, rot |               |          |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                             | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7141518                                               | 10/10         | 00849959 |

| Dynacast® Prelude Strap Kits, untere Extremitäten, blau |               |          |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                               | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7141519                                                 | 10/10         | 00849965 |

# Delta-Cast® Conformable

## Der Beste seiner Klasse

**Delta-Cast® Conformable** setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Cast-Verbinden aus Polyester. Seine Vielseitigkeit macht **Delta-Cast® Conformable** zu einem wahren Multitalent in der täglichen Versorgung von Frakturen jeder Art. Das Geheimnis liegt dabei in der Kombination vieler anwendungsfreundlicher Produkteigenschaften, die **Delta-Cast® Conformable** zur Nr. 1 weltweit machen.

**Material:** 3D-Stretch-Polyestergewirk

**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

## Vorteile auf einen Blick

- Exzellente Anpassungsfähigkeit dank 3D-Stretch-Gewebe
- Faltenfreie Applikation ohne jegliche Druckpunkte
- Zuverlässiger Lagenverbund
- Vielseitiges Anwendungsspektrum
- Belastbar nach ca. 20 Minuten
- 2–3 Lagen sind problemlos mit der Schere zu schneiden

## Anwendungsgebiete

- Für zirkuläre Cast-Verbände
- Für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

## Anwendungsdauer

Bis zu mehreren Wochen



Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung mit zirkulären Cast-Verbinden.

| Delta-Cast® Conformable |        |                 |               |          |
|-------------------------|--------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.               | Farbe  | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7228000                 | weiß   | 2,5 cm x 1,8 m  | 10/10         | 03734300 |
| 7228001                 | weiß   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590820 |
| 7228002                 | weiß   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590837 |
| 7228003                 | weiß   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590843 |
| 7228004                 | weiß   | 12,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590866 |
| 7228200                 | blau   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590903 |
| 7228201                 | blau   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590926 |
| 7228202                 | blau   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590932 |
| 7228500                 | rot    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426899 |
| 7228501                 | rot    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426497 |
| 7228502                 | rot    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 01426729 |
| 7228700                 | grün   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426451 |
| 7228701                 | grün   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426439 |
| 7228702                 | grün   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 01426474 |
| 7228400                 | orange | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590978 |
| 7228401                 | orange | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590984 |
| 7228402                 | orange | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590990 |
| 7228300                 | gelb   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590949 |
| 7228301                 | gelb   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590955 |
| 7228302                 | gelb   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590961 |

| Delta-Cast® Conformable |         |                 |               |          |
|-------------------------|---------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.               | Farbe   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7228600                 | lila    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426942 |
| 7228601                 | lila    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01426913 |
| 7228602                 | lila    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 01426965 |
| 7228100                 | pink    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590872 |
| 7228101                 | pink    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04590889 |
| 7228102                 | pink    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04590895 |
| 7228800                 | schwarz | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 02845919 |
| 7228801                 | schwarz | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 02845925 |
| 7228802                 | schwarz | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 02845931 |

| Delta-Cast® Conformable Mischpackung<br>mit verschiedenen Farben* |                                                                                     |                 |               |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                         | Farbe                                                                               | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7228910                                                           |  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330309 |
| 7228911                                                           |                                                                                     | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330315 |
| 7228912                                                           |                                                                                     | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 11330321 |


\*Die Mischpackungen von Delta-Cast® Conformable enthalten die Farben Dunkelblau, Rot, Lila, Pink und Schwarz. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.



## Unendliche Möglichkeiten – Durch die funktionelle Cast-Therapie



## Hervorragende Handhabung – Für mehr Arbeitseffizienz

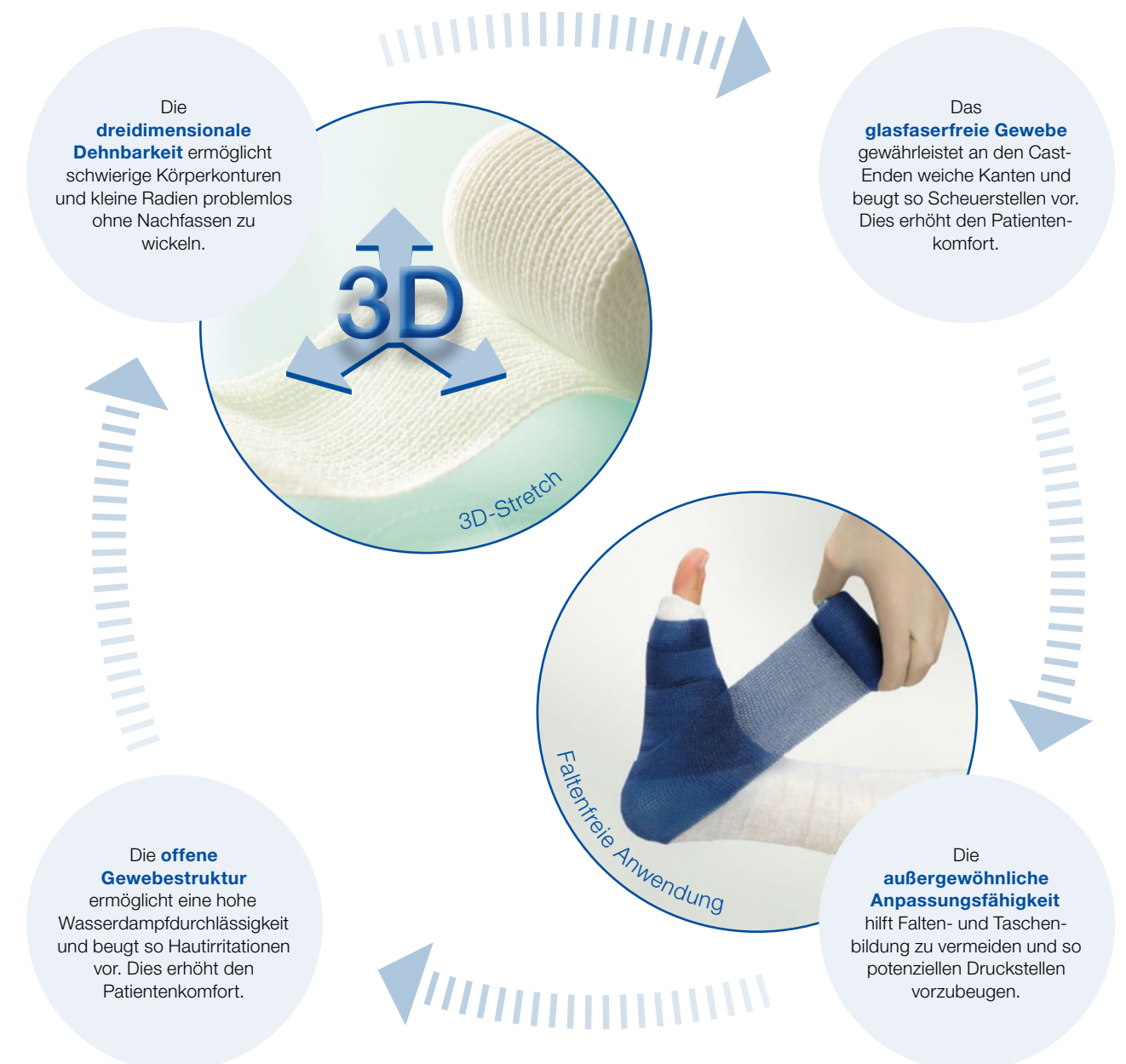

# Delta-Cast® Elite

## Die fortschrittliche Lösung

**Delta-Cast® Elite** vereint alle Vorteile eines fortschrittlichen glasfaserfreien Castmaterials. **Delta-Cast® Elite** ist ein leichter, aber rigider glasfaserfreier Cast-Verband, der entwickelt wurde, um dem Anwender eine einfache Applikation und dem Patienten einen hohen Tragekomfort zu bieten.

**Material:** Elastisches Polyestergewirk  
**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Gute Anpassungsfähigkeit
- Verlässlicher Lagenverbund
- Sichere Immobilisierung
- Glatte Oberfläche und weiche Kanten
- Kosteneffiziente Lösung
- Belastbar nach ca. 20 Minuten

### Anwendungsgebiete

- Für rigide zirkuläre Cast-Verbände und Schienen

### Anwendungsdauer

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung mit zirkulären Cast-Verbänden.

| Delta-Cast® Elite |         |                 |               |          |
|-------------------|---------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.         | Farbe   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7227904           | weiß    | 2,5 cm x 1,8 m  | 10/10         | 04780762 |
| 7227900           | weiß    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07504695 |
| 7227901           | weiß    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07504703 |
| 7227902           | weiß    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07504726 |
| 7227903           | weiß    | 12,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 07504732 |
| 7227600           | blau    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550442 |
| 7227601           | blau    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550465 |
| 7227602           | blau    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07550488 |
| 7227500           | rot     | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550376 |
| 7227501           | rot     | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550399 |
| 7227502           | rot     | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07550413 |
| 7345400           | grün    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 05382644 |
| 7345401           | grün    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 05382650 |
| 7345402           | grün    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 05382667 |
| 7227700           | lila    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550560 |
| 7227701           | lila    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550583 |
| 7227702           | lila    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07550614 |
| 7227800           | schwarz | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550637 |
| 7227801           | schwarz | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07550666 |
| 7227802           | schwarz | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07550689 |

| Delta-Cast® Elite Mischpackung mit verschiedenen Farben* |       |                 |               |          |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                | Farbe | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7345700                                                  |       | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330278 |
| 7345701                                                  |       | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330284 |
| 7345702                                                  |       | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 11330290 |

\*Die Mischpackungen von Delta-Cast® Elite enthalten die Farben Dunkelblau, Hellblau, Rot, Lila und Pink. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.

| Delta-Cast® Elite Longetten 3-lagig |       |                |               |          |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                           | Farbe | Abmessung      | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7454507                             | weiß  | 5,0 cm x 20 cm | 10/10         | 03971394 |
| 7454508                             | weiß  | 7,5 cm x 20 cm | 10/10         | 03971402 |
| 7454509                             | weiß  | 7,5 cm x 38 cm | 10/10         | 03971856 |
| 7454506                             | weiß  | 7,5 cm x 76 cm | 10/10         | 03971922 |

| Delta-Cast® Elite Longetten 5-lagig |       |                 |               |          |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                           | Farbe | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7454503                             | weiß  | 10,0 cm x 38 cm | 10/10         | 07783991 |
| 7454504                             | weiß  | 10,0 cm x 90 cm | 10/10         | 07784016 |
| 7454505                             | weiß  | 12,5 cm x 90 cm | 10/10         | 07784022 |

# Delta-Cast® Elite

## Entscheidende Vorteile

**Elastisches Trägermaterial**



Hohe Elastizität des Trägermaterials erlaubt ein **faltenfreies Anwickeln** auch an problematischen Konturen.

**Exzellentes Abrollverhalten**



Begünstigt **durchgängiges Wickeln** und ermöglicht es, Überdehnung und Einschnüren zu vermeiden.



**Sichere Lamination**

Verwandelt den zuverlässigen Lagenverbund zu einer stabilen Einheit und gewährleistet eine **starke Immobilisation**.

# Delta-Cast® Soft

## Die flexible Lösung

Der glasfaserfreie **Delta-Cast® Soft** gewährleistet bei Frakturen und Weichteilverletzungen eine optimale funktionelle Unterstützung. Semi-rigide Stützverbände erlauben größtmögliche Flexibilität und hohe Formstabilität. Der Cast nimmt immer wieder seine Ausgangsform an und stellt dadurch genau das richtige Maß an Ruhigstellung sicher.

**Material:** Flexibles Polyestergewirk  
**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Frühe Patientenmobilität
- Flexibles Material fördert den Heilungsprozess
- Hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht faltenfreie Anlage
- Sehr gute Rückstellkraft des fertigen Verbandes
- Belastbar nach ca. 20 Min.
- Weiche Kanten beugen Druckstellen vor

### Anwendungsgebiete

- Für zirkuläre Cast-Verbände
- Für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

### Anwendungsdauer

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung Delta-Cast® Soft.

Hinweis: zur fokussierten Ruhigstellung können Longetten aus Hartcast aus z.B. dem **Delta-Cast® Elite** Sortiment verwendet werden. (siehe S. 16)

| Delta-Cast® Soft |         |                 |               |          |
|------------------|---------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.        | Farbe   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7270802          | weiß    | 2,5 cm x 1,8 m  | 10/10         | 09275709 |
| 7270812          | weiß    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275715 |
| 7270822          | weiß    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275721 |
| 7270832          | weiß    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 09275738 |
| 7270842          | weiß    | 12,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 09275744 |
| 7270835          | blau    | 2,5 cm x 1,8 m  | 10/10         | 14366667 |
| 7270805          | blau    | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275595 |
| 7270815          | blau    | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275649 |
| 7270825          | blau    | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 09275661 |
| 7270808          | rot     | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275678 |
| 7270818          | rot     | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275684 |
| 7270828          | rot     | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 09275690 |
| 7270801          | schwarz | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275477 |
| 7270811          | schwarz | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275508 |
| 7270821          | schwarz | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 09275514 |

| Delta-Cast® Soft |           |                 |               |          |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.        | Farbe     | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7270850          | pink      | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 02493633 |
| 7270851          | pink      | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 02494897 |
| 7270852          | pink      | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 02494940 |
| 7270809          | Bärenatze | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275543 |
| 7270819          | Bärenatze | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 09275566 |
| 7270860          | Herzmotiv | 5 cm x 3,6 cm   | 10/10         | 10055700 |
| 7270861          | Herzmotiv | 7,5 cm x 3,6 cm | 10/10         | 10055717 |

| Delta-Cast® Soft Mischpackung mit versch. Farben/Motiven* |       |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                 | Farbe | Abmessung      | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7270890                                                   |       | 5,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 16023368 |
| 7270891                                                   |       | 7,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 16023374 |

\* Mischpackungen: Blau, Rot, Schwarz, Bärenatze, Herzmotiv. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.

# Delta-Cast® Soft

## Einfache Handhabung in der Anwendung



- Leichtes Abrollverhalten ermöglicht eine gleichmäßige Verbandsstruktur
- Keine zusätzliche Polsterung notwendig

Einfache Anwendung



Vielseitige Applikation



Leicht abnehmbar

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten in der Funktionellen-Cast-Therapie
- Zusätzliche Stabilisierung ist durch den Einsatz einer Longette möglich

Zurück zur  
Sortimentsübersicht

# Delta-Cast® Prints

## Die spielerische Lösung

**Delta-Cast® Prints** ist weltweit der einzige patentierte bedruckte Stützverband. Seine farbenfrohen Muster und eine besonders unkomplizierte und schnelle Applikation helfen jungen Patienten ihre Angst vor dem Besuch beim Arzt und dem Anlegen des Casts zu überwinden.

**Material:** Elastisches Polyestergewirk  
**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Erhältlich in verschiedenen Motiven
- Hohe Patienten-Compliance
- Schnelle und sichere Immobilisierung
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Weiche Kanten
- Belastbar nach ca. 20 Min.
- Leicht und stabil

### Anwendungsgebiete

- Für rigide zirkuläre Cast-Verbände und Schienen

### Anwendungsdauer

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung mit zirkulären Cast-Verbänden.

| Delta-Cast® Prints                             |                |        |               |          |
|------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                      | Abmessung      | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN      |
| <b>Dinosaurier</b>                             |                |        |               |          |
| 7227302                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 02129117 |
| <b>Teddybären</b>                              |                |        |               |          |
| 7227305                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 02129169 |
| <b>Pastel Print</b>                            |                |        |               |          |
| 7227317                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 09668811 |
| 7227307                                        | 7,5 cm x 3,6m  | 10     | 1/1           | 02129181 |
| <b>Fußbälle</b>                                |                |        |               |          |
| 7227308                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 00368970 |
| 7227309                                        | 7,5 cm x 3,6m  | 10     | 1/1           | 00424160 |
| <b>Bärentatzen</b>                             |                |        |               |          |
| 7227320                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 00424326 |
| 7227321                                        | 7,5 cm x 3,6m  | 10     | 1/1           | 00424361 |
| <b>Wintermotiv</b> (nur saisonal erhältlich)   |                |        |               |          |
| 7227303                                        | 5,0 cm x 3,6 m | 10     | 1/1           | 02129123 |
| 7227304                                        | 7,5 cm x 3,6m  | 10     | 1/1           | 02129146 |
| <b>Mischpackung mit verschiedenen Motiven*</b> |                |        |               |          |
| 7227360                                        | 5,0 cm x 3,6m  | *      | 10/10         | 16023380 |
| 7227361                                        | 7,5 cm x 3,6m  | *      | 10/10         | 16023397 |



\*2 Rollen pro Motiv/Packung:  
Pastel, Bärentatzen, Fußballmotiv,  
Camouflage, Pink Camouflage

# Delta-Cast® Prints

## der bunte Helfer im Cast-Raum

### Abwechslung

Die sechs unterschiedlichen Muster sorgen für eine gelungene Abwechslung im Cast-Alltag




### Sicheres Gefühl

2- bis 3-lagig kann **Delta-Cast® Prints** anstatt mit der Säge auch mit der Verbandschere aufgeschnitten werden und reduziert somit die Unsicherheit der Patienten

### Patientenzufriedenheit

Die individuelle Musterwahl erhöht die Patientenzufriedenheit

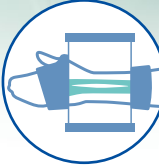

### Röntgentransparenz

Das Polyestergewebe ist röntgentransparent und erspart einen Castwechsel




# Die Delta-Cast® Mischpackungen

## 5 Farben/Motive in einer Packung

Die einzigartigen Mischpackungen von **Delta-Cast® Conformable**, **Delta-Cast® Elite**, **Delta-Cast® Soft** und **Delta-Cast® Prints** bieten Ihnen und Ihren Patienten nicht nur mehr Auswahl und zusätzliche Farben, sondern auch die Möglichkeit einer optimierten Lagerhaltung.


### Delta-Cast® Conformable

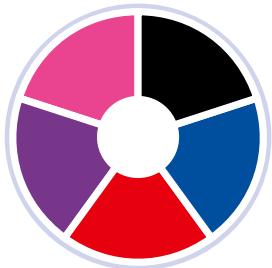

Dunkelblau, Schwarz, Rot, Lila, Pink

**Delta-Cast® Conformable** setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Cast-Verbänden aus Polyester.

### Delta-Cast® Elite

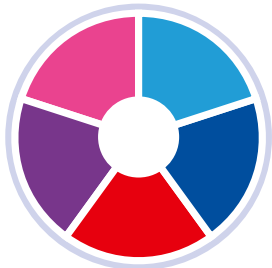

Dunkelblau, Hellblau, Rot, Lila, Pink

**Delta-Cast® Elite** ist ein leichter, aber rigider Cast-Verband, der Anwendern eine einfache Applikation und dem Patienten einen hohen Tragekomfort bietet.

### Delta-Cast® Soft



Blau, Rot, Schwarz, Bärenatze, Herzmotiv

Der glasfaserfreie **Delta-Cast® Soft** gewährleistet bei Frakturen und Weichteilverletzungen eine optimale funktionelle Unterstützung.

### Delta-Cast® Prints




Pastel, Bärenatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage

Die farbenfrohen Muster von **Delta-Cast® Prints** und die unkomplizierte und schnelle Applikation können jungen Patienten helfen ihre Angst vor dem Besuch beim Arzt und der Anlage eines Cast-Verbands zu überwinden.

| Delta-Cast® Conformable Mischpackung |                                                                                     |                 |               |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                            | Farbe                                                                               | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7228910                              |  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330309 |
| 7228911                              |                                                                                     | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330315 |
| 7228912                              |                                                                                     | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 11330321 |
| Delta-Cast® Soft Mischpackung        |                                                                                     |                 |               |          |
| Best.-Nr.                            | Farbe                                                                               | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7270890                              |  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 16023368 |
| 7270891                              |                                                                                     | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 16023374 |

| Delta-Cast® Elite Mischpackung  |                                                                                      |                 |               |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                       | Farbe                                                                                | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7345700                         |  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330278 |
| 7345701                         |                                                                                      | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 11330284 |
| 7345702                         |                                                                                      | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 11330290 |
| Delta-Cast® Prints Mischpackung |                                                                                      |                 |               |          |
| Best.-Nr.                       | Farbe                                                                                | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7227360                         |  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 16023380 |
| 7227361                         |                                                                                      | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 16023397 |

# Bringen Sie mehr Farbe in Ihren Cast-Raum!

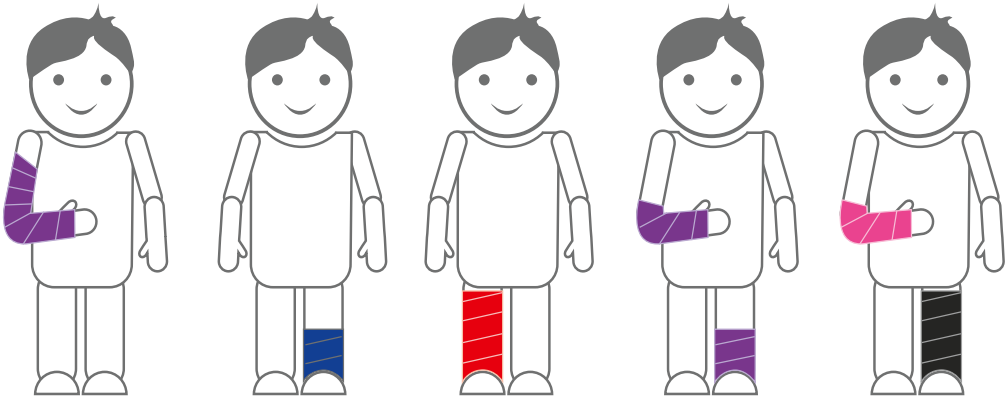

# Delta-Lite® Conformable

## Die fortschrittliche, haltbare Lösung

Die ausgezeichnete Handhabung macht **Delta-Lite® Conformable** zu einem der fortschrittlichsten Glasfaserstützverbände auf dem Markt. Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und die innovative Harzrezeptur garantieren eine sichere und dauerhafte Versorgung.

**Material:** Elastisches Glasfasergewirk  
**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Hohe Anpassungsfähigkeit auch an schwierigen Körperregionen
- Rigide und dauerhafte Immobilisierung
- Sicherer Lagenverbund
- Leichtigkeit und Stabilität
- Erhöhter Komfort

### Anwendungsgebiete

- Für stark beanspruchte Stützverbände wie Gehverbände am Unterschenkel
- Für Frakturen und Verletzungen, die eine komplette Ruhigstellung erfordern

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta-Lite® Conformable |       |                 |               |          |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.               | Farbe | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7227000                 | weiß  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 03389412 |
| 7227001                 | weiß  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 03389441 |
| 7227002                 | weiß  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 03389470 |
| 7227003                 | weiß  | 12,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 03389501 |
| 7226600                 | blau  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252721 |
| 7226601                 | blau  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252744 |
| 7226602                 | blau  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04252767 |
| 7226500                 | rot   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252661 |
| 7226501                 | rot   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252684 |
| 7226502                 | rot   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04252709 |
| 7226700                 | grün  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252796 |
| 7226701                 | grün  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 04252810 |
| 7226702                 | grün  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 04252833 |
| 7226800                 | lila  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07535980 |
| 7226801                 | lila  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 07536005 |
| 7226802                 | lila  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 07536028 |

# Delta-Lite® Plus

## Die zuverlässig-rigide Lösung

**Delta-Lite® Plus** ist die Lösung, wenn es bei Frakturen insbesondere auf eine stabile und langanhaltende Versorgung ankommt. Das Glasfasermaterial sorgt gemeinsam mit der speziell formulierten Harzrezeptur für eine verlässliche Ruhigstellung.

**Material:** Elastisches Glasfasergewebe  
**Beschichtung:** Wasseraktivierbares Polyurethanharz

### Vorteile auf einen Blick

- Starker Halt
- Verlässlicher Lagenverbund
- Exzellentes Abrollverhalten
- Glatte Oberfläche
- Kosteneffiziente Lösung

### Anwendungsgebiete

- Für stark beanspruchte Stützverbände wie Gehverbände am Unterschenkel
- Für Frakturen und Verletzungen, die eine komplette Ruhigstellung erfordern

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta-Lite® Plus |       |                 |               |          |
|------------------|-------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.        | Farbe | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7345801          | weiß  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00257302 |
| 7345802          | weiß  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00265945 |
| 7345803          | weiß  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 00277457 |
| 7345804          | weiß  | 12,5 cm x 3,6 m | 10/10         | 00277463 |
| 7345820          | blau  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00277486 |
| 7345821          | blau  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00277492 |
| 7345822          | blau  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 00445280 |
| 7345830          | rot   | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00605329 |
| 7345831          | rot   | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 00673555 |
| 7345832          | rot   | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 00803118 |
| 7345865          | gelb  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01292223 |
| 7345866          | gelb  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01292252 |
| 7345867          | gelb  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 01313184 |
| 7345860          | lila  | 5,0 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01291063 |
| 7345861          | lila  | 7,5 cm x 3,6 m  | 10/10         | 01291407 |
| 7345862          | lila  | 10,0 cm x 3,6 m | 10/10         | 01291703 |

| Delta-Lite® Plus Longetten 5-lagig |       |                 |               |          |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                          | Farbe | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7348500                            | weiß  | 5,0 cm x 20 cm  | 10/10         | 00314106 |
| 7348501                            | weiß  | 7,5 cm x 20 cm  | 10/10         | 00314112 |
| 7227200                            | weiß  | 7,5 cm x 38 cm  | 10/10         | 00314081 |
| 7348502                            | weiß  | 7,5 cm x 76 cm  | 10/10         | 00314129 |
| 7348503                            | weiß  | 10,0 cm x 38 cm | 10/10         | 00314135 |
| 7227201                            | weiß  | 10,0 cm x 90 cm | 10/10         | 00314098 |
| 7348504                            | weiß  | 12,5 cm x 90 cm | 10/10         | 00314141 |

# Naturgips-Verbände



Die Versorgung von Frakturen verlangt ein bewährtes Material, das einfach zu verarbeiten und sehr gut anmodellierbar ist. Die Naturgips-Verbände **Platrix®**, **Biplatrix®** und **Specialist® E** erfüllen diese Anforderungen und bieten darüber hinaus eine hohe Wirtschaftlichkeit. Sie werden zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen sowie zur Sekundärversorgung eingesetzt, die eine Ruhigstellung erfordern.

**Hinweis für alle Naturgips-Verbände:** Für ein optimales Ergebnis achten Sie bitte darauf, dass die Tauchwassertemperatur 20 °C bis 25 °C entspricht. Auf diese Weise ergibt sich eine offene Zeit von 2–4 Minuten. Teilbelastbar sind alle Naturgips-Verbände nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden.

# Produktübersicht

## Naturgips-Verbände

|               |       |
|---------------|-------|
| Platrix®      | S. 28 |
| Biplatrix®    | S. 29 |
| Specialist® E | S. 30 |

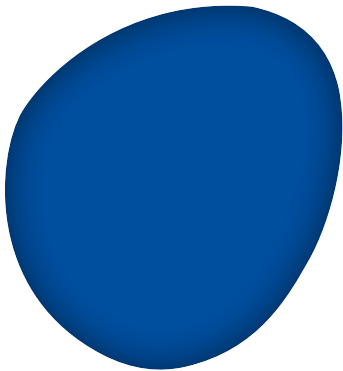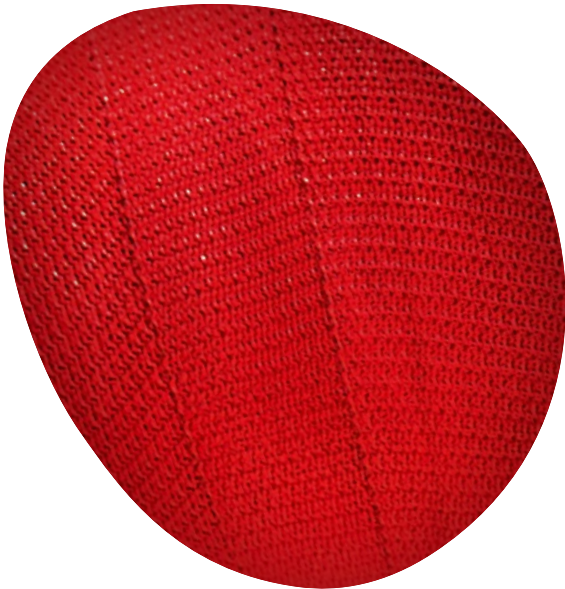

# Platrix®

## Die Hartgipsbinde für die Ruhigstellung

Die **Platrix®** Hartgipsbinde vereint alle Eigenschaften, die die Versorgung von Frakturen verlangt. Sie ist einfach in der Anwendung, sehr gut anmodellierbar und zudem in jeder Anwendung wirtschaftlich. Bereits wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband. **Platrix®** ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich. Die offene Zeit beträgt ca. 2-5 Minuten.

**Material:** Baumwollträger mit Naturgipsmischung

### Vorteile auf einen Blick

- Ausgezeichnete Modellierbarkeit
- Hohe Endfestigkeit
- Kosteneffizient
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

### Anwendungsgebiete

- Primärversorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Biplatrix®

## Die Schnellgipsbinde für die Ruhigstellung

Die **Biplatrix®** Schnellgipsbinde ist das Produkt der Wahl, wenn bei Frakturen eine schnellere Immobilisierung erforderlich ist. Sie ist vor allem für die Primärversorgung geeignet. **Biplatrix®** ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich. Die offene Zeit beträgt ca. 2 Minuten.

**Material:** Baumwollträger mit Naturgipsmischung

### Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Immobilisierung
- Sehr gute Modellierbarkeit
- Hohe Endfestigkeit
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

### Anwendungsgebiete

- Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Platrix® Hartgipsbinden, eingesiegelt zu 2 Binden, 2m |                 |               |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                             | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0298300                                               | 6,0 cm x 2,0 m  | 20/20         | 07154025 |
| 0298400                                               | 8,0 cm x 2,0 m  | 20/20         | 07154031 |
| 0298500                                               | 10,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154048 |
| 0298600                                               | 12,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154054 |
| 0298700                                               | 15,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154060 |
| Platrix® Hartgipsbinden, eingesiegelt zu 4 Binden, 3m |                 |               |          |
| 0292400                                               | 5,0 cm x 3,0 m  | 40/40         | 07154077 |
| Platrix® Hartgipsbinden, eingesiegelt zu 2 Binden, 3m |                 |               |          |
| 0292500                                               | 8,0 cm x 3,0 m  | 20/20         | 07154083 |
| 0292600                                               | 10,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154108 |
| 0292700                                               | 12,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154114 |
| 0292800                                               | 15,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154120 |
| 0292900                                               | 20,0 cm x 3,0 m | 10/10         | 07154137 |

| Platrix® Gipslongetten, 100 m, 4-fach gelegt |                  |               |          |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                    | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0297300                                      | 10,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01939127 |
| 0297400                                      | 12,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01939133 |
| 0297500                                      | 15,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01939156 |
| 0297600                                      | 20,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01939162 |

| Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingesiegelt zu 2 Binden, 2 m |                 |               |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0201000                                                     | 6,0 cm x 2,0 m  | 20/20         | 07154143 |
| 0201100                                                     | 8,0 cm x 2,0 m  | 20/20         | 07154166 |
| 0201200                                                     | 10,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154172 |
| 0201300                                                     | 12,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154189 |
| 0201400                                                     | 15,0 cm x 2,0 m | 20/20         | 07154195 |
| Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingesiegelt zu 4 Binden, 3 m |                 |               |          |
| 0291100                                                     | 5,0 cm x 3,0 m  | 40/40         | 07154203 |
| Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingesiegelt zu 2 Binden, 3 m |                 |               |          |
| 0291200                                                     | 8,0 cm x 3,0 m  | 20/20         | 07154226 |
| 0291300                                                     | 10,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154232 |
| 0291400                                                     | 12,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154249 |
| 0291500                                                     | 15,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154255 |
| 0291600                                                     | 20,0 cm x 3,0 m | 10/10         | 07154261 |

| Biplatrix® Gipslongetten, 100 m, 4-fach gelegt |                  |               |          |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                      | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0291900                                        | 10,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01342530 |
| 0291800                                        | 12,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01598732 |
| 0292000                                        | 15,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01342547 |
| 0292100                                        | 20,0 cm x 25,0 m | 1/1           | 01342553 |

# Specialist® E

## Gipsbinden und Longetten für eine rigide Immobilisation

**Specialist® E** Gipsbinden sind besonders gefragt, wenn eine rigide Immobilisierung gesichert werden soll. **Specialist® E** ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt verfügbar. Die offene Zeit beträgt ca. 2-5 Minuten.

**Material:** Baumwollträger mit Naturgipsmischung

### Vorteile auf einen Blick

- Perforierter Bindenkern für eine gleichmäßige Aktivierung des Materials
- Strapazierfähig
- Hohe Formbarkeit und Anschmiegsamkeit
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

### Anwendungsgebiete

- Versorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



| Specialist® E, Gipsbinden |                 |               |          |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                 | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7226000                   | 5,0 cm x 2,7 m  | 1/4           | 00643100 |
| 7226001                   | 7,5 cm x 2,7 m  | 1/1           | 00643117 |
| 7226002                   | 10,0 cm x 2,7 m | 1/1           | 00643123 |
| 7226003                   | 12,5 cm x 2,7 m | 1/1           | 00643146 |
| 7226004                   | 15,0 cm x 2,7 m | 1/1           | 00643152 |
| 7226005                   | 20,0 cm x 2,7 m | 1/1           | 00643169 |

| Specialist® E, Gipslongetten |                  |               |          |
|------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                    | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7225900                      | 10,0 cm x 20,0 m | 1/1           | 00643175 |
| 7225901                      | 12,5 cm x 20,0 m | 1/1           | 00643181 |
| 7225902                      | 15,0 cm x 20,0 m | 1/1           | 00650962 |
| 7225903                      | 20,0 cm x 20,0 m | 1/1           | 00650979 |

# Polsterwatten und Schlauchverbände

Die fachgerechte Anlage von **Starr- und Stützverbänden** erfordert eine Vielzahl von Schritten, um ein optimales Ergebnis für die Patienten zu erzielen. Vor der eigentlichen Anlage von Verbänden jeder Art steht der Hautschutz zur Vermeidung von Druckstellen und Hautirritationen im Vordergrund.

**Wasserabweisende Produkte** sind in der modernen Cast-Therapie nicht mehr wegzudenken. Der Grund: Patienten können ihrer gewohnten täglichen **Hygiene** uneingeschränkt nachkommen. **Delta-Dry®** stellt die neueste Generation in diesem Segment dar und bietet außergewöhnliche Produkteigenschaften.

Die Kombination aus traditionellen Materialien wie z. B. Schlauchverband und Polsterung bietet insbesondere exponierten Stellen (z. B. Knochenvorsprüngen) einen optimalen Schutz. Zusätzlich wird die **Krepppapierbinde** zur Vorfixierung der Extremität und zur Komprimierung des Polstermaterials eingesetzt, um eine verlässliche Ruhigstellung zu gewährleisten.



# Produktübersicht

Hinweise zur punktuellen Polsterung S. 34

## Wasserfeste Polsterwatte und Schlauchverbände

Delta-Dry® Softliner S. 37

Delta-Dry® Polsterwatte S. 39

## Polsterschlauchverbände

Delta Terry-Net™ S S. 40

Delta Terry-Net™ C S. 41

## Trikotschlauchverbände

Tricofix® S. 42

Delta-Net® Stockinette S. 43

## Polsterwatten

Artiflex® S. 44

Artiflex® Soft S. 44

Artiflex® Natur S. 44

Delta-Rol® S S. 45


Delta-Rol® S. 46

Specialist® S. 47

## Polsterzubehör

Tensoban® S. 48


Krepppapierbinde S. 49

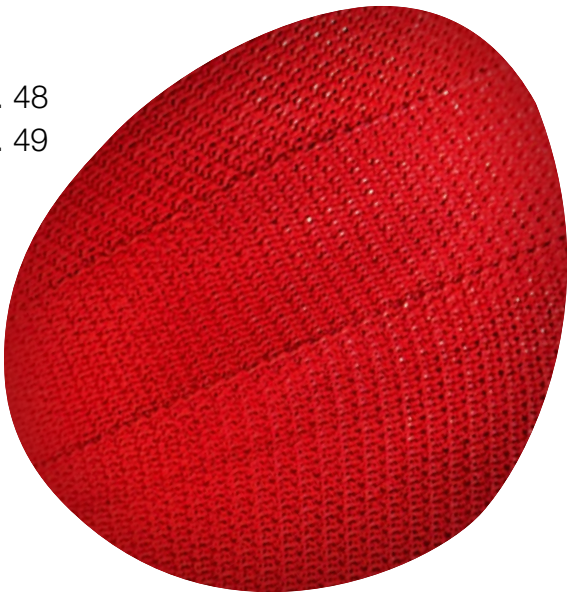

# Punktuelle Polsterung

Die **punktuelle Polsterung ermöglicht es**, nahe an den Körper zu kommen und somit eine maximale Stabilisation zu erreichen. Die exponierten und druckempfindlichen Stellen können von Patient zu Patient unterschiedlich ausgeprägt sein, abhängig davon, wie viel körpereigenes Polster vorhanden ist.


Ziel der Polsterung ist es, Druck zu verhindern oder gegebenenfalls umzuverteilen. Als Grundsatz gilt – so viel wie nötig – so wenig wie möglich, um den Stützverband möglichst passgenau anfertigen zu können. Dafür steht unser umfangreiches Polster-Sortiment von z.B. **Delta Terry-Net™**, **Delta-Dry®** und **Artiflex®** zur Verfügung.

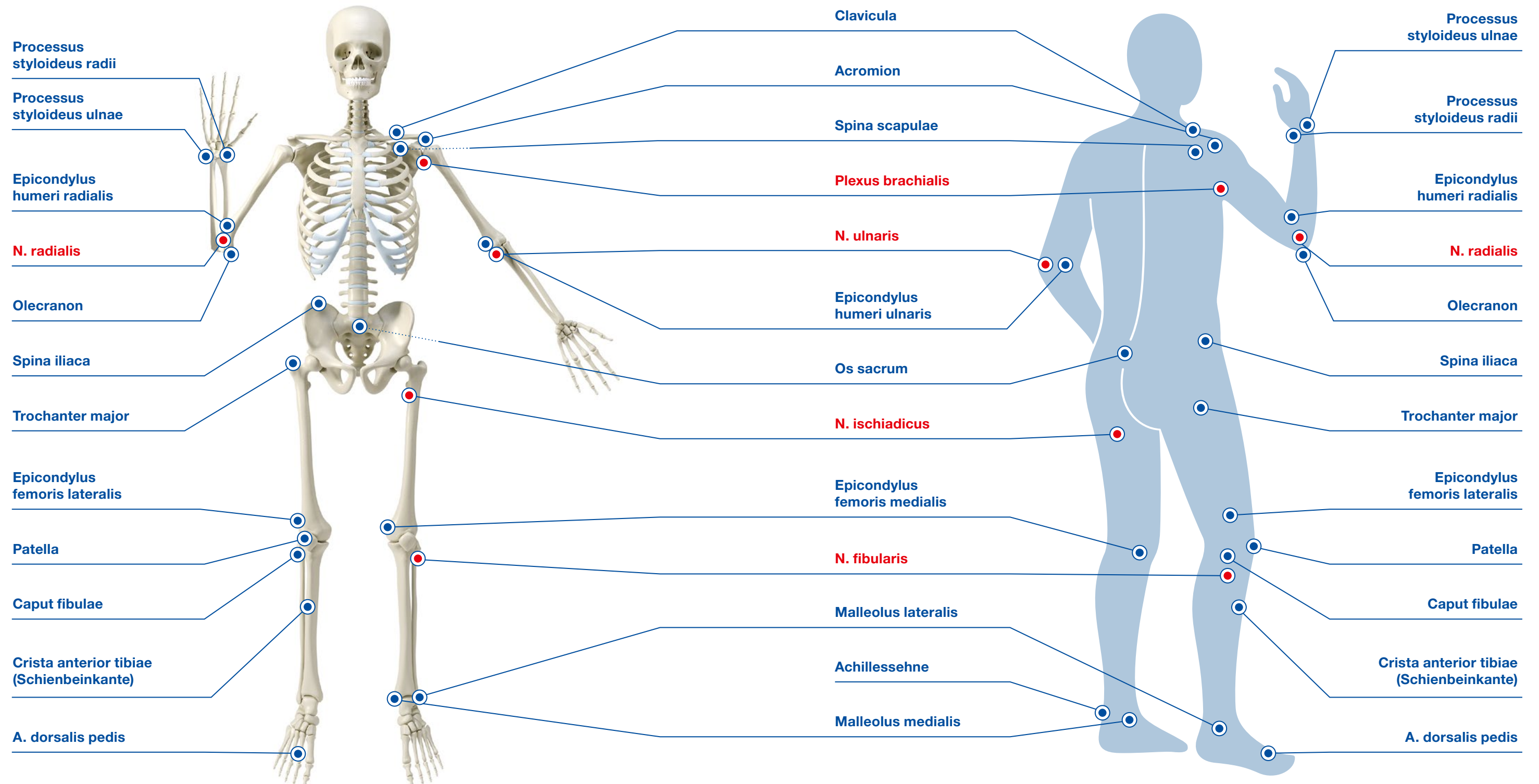

# Delta-Dry®

## Hygiene-Vergleich

Im direkten Vergleich zeigt sich der hohe Hygienestandard von **Delta-Dry®** deutlich. Nach mehreren Wochen Tragedauer ist der Cast mit **Delta-Dry® Softliner** noch fast strahlend weiß.

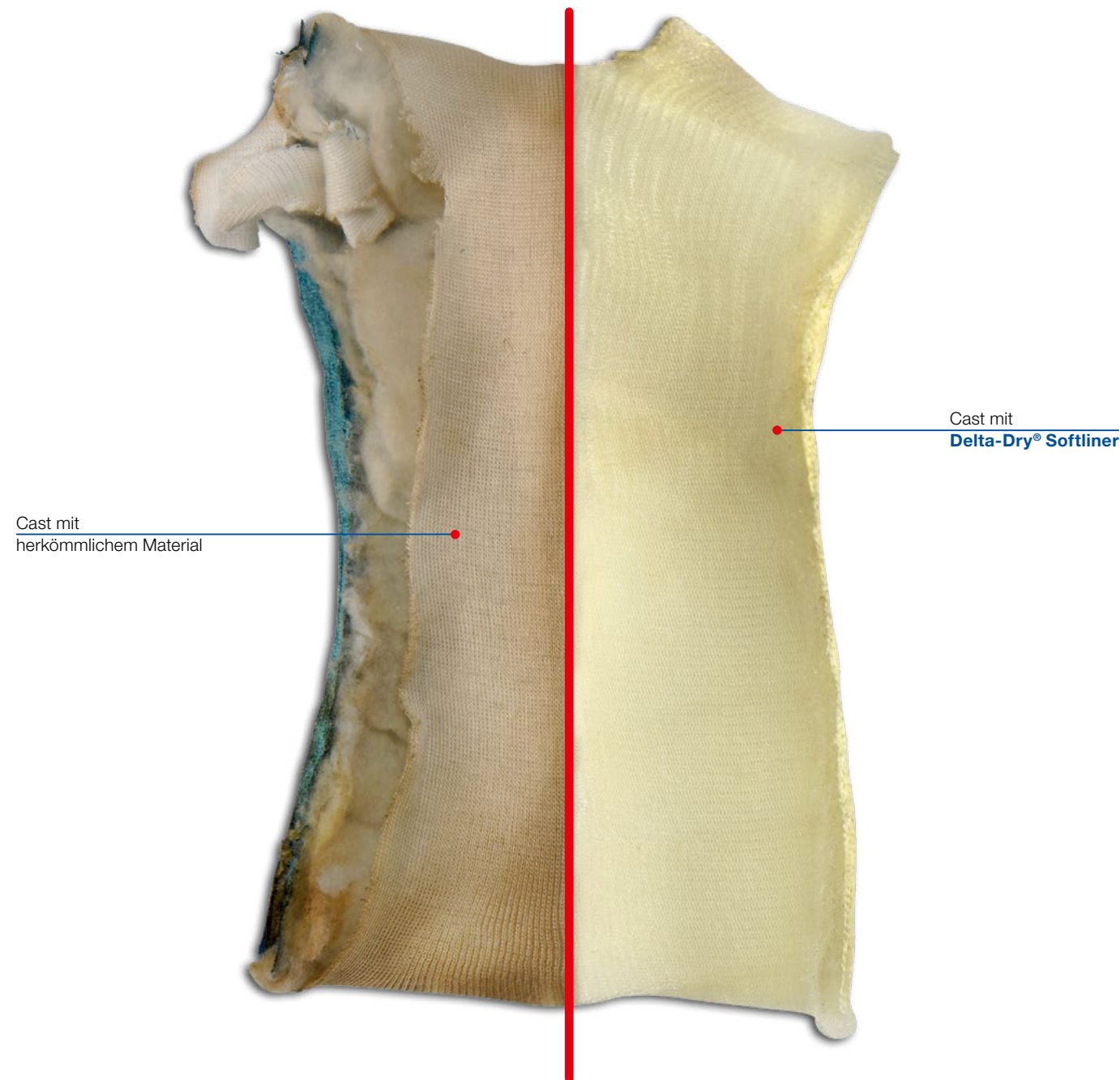

# Delta-Dry® Softliner

## Der neue Standard der modernen Cast-Therapie

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Cast-Therapie nicht mehr wegzudenken. Der Grund: Patienten können wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen. Der **Delta-Dry® Softliner** setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: Bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Cast-Wechsel und eine extrem einfache Applikation.



### Hygiene und Wohlbefinden

- Trotz Cast kann der Patient der täglichen Handhygiene für einen wirksamen Gesundheitsschutz nachgehen
- Durch die vielfältigen Hygienemöglichkeiten werden Gerüche, Hautmazerationen und Juckreiz reduziert
- Das weiche Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Das Durchspülen des Castes mit fließendem kalten Wasser hat einen schmerzlindernden Effekt und steigert das Wohlbefinden des Patienten

### Quick-Dry-System: Trocknung in zwei Phasen

#### 1. Drainage-Effekt


Die patentierte offene Struktur des Schlauchverbandes ermöglicht einen besonders effektiven Drainage-Effekt, der für einen schnellen Abtransport des Wassers aus dem Cast sorgt.

#### 2. Verdunstung

Durch die warme Körpertemperatur verdampft die noch vorhandene Restfeuchtigkeit. Die besondere Anordnung der Fasern erlaubt eine Luftzirkulation im Gewebe und sorgt dadurch für eine schnelle Trocknung des Materials.

hohe Wasserkonzentration im Produkt

keine Wasserkonzentration im Produkt

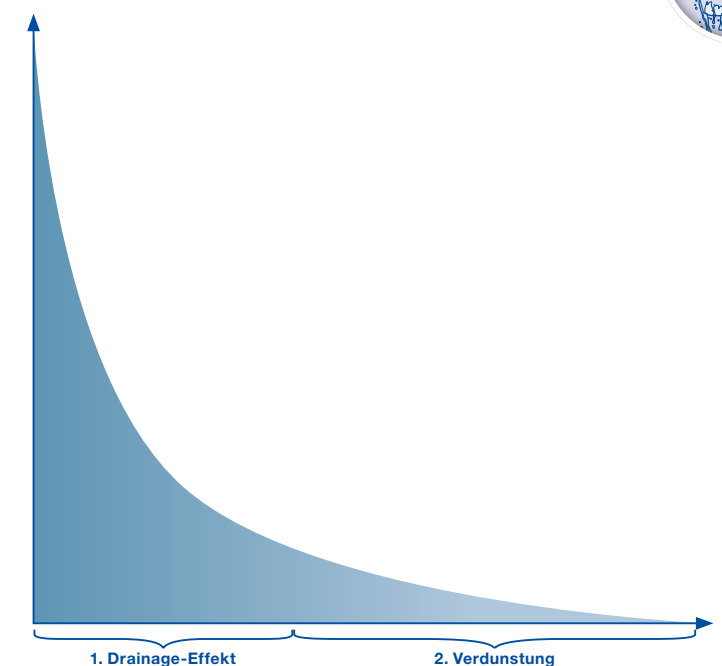

Quelle: BSN medical, interne Untersuchung

# Delta-Dry® Softliner

## Die hygienische Lösung, die alles mitmacht

Delta-Dry® stellt die moderne Komfortklasse im Segment der Unterpolsterung dar. Der wasserdurchlässige Polsterschlauchverband **Delta-Dry® Softliner** garantiert eine optimale Polsterung, somit wird keine zusätzliche Polsterwatte benötigt. Die besondere Struktur der Fasern gewährleistet einen schnellen Abtransport von eindringendem Wasser. Dadurch wird Hautirritationen, Juckreiz und Gerüchen vorgebeugt.

**Material:** 3D-Stretch-Gewebe, 100 % Nylon

### Vorteile auf einen Blick

- Wasserdurchlässig
- Hygienisch
- Verringert Hautirritationen
- Schnelltrocknend
- Einfaches Anlegen, keine neue Technik zu lernen
- Keine ungeplanten Cast-Wechsel
- Keine zusätzliche Polsterwatte notwendig
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden
- Nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen, Verstauchungen
- Synthetische Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



 Hilfreiche Anwendungstipps finden Sie jederzeit in unserer [YouTube-Playlist](#) mit verschiedenen Hinweisen rund um die Versorgung Delta-Dry® Softliner.

| Delta-Dry® Softliner |                  |               |          |
|----------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.            | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7277901              | 2,5 cm x 10,0 m  | 1/4           | 09531348 |
| 7277902              | 5,0 cm x 10,0 m  | 1/4           | 09531354 |
| 7277903              | 7,5 cm x 10,0 m  | 1/3           | 09531360 |
| 7277904              | 10,0 cm x 10,0 m | 1/2           | 09531383 |
| 7277905              | 12,5 cm x 10,0 m | 1/2           | 09531408 |

# Delta-Dry® Polsterwatte

## Die wasserfeste Polsterwatte unter synthetischen Stützverbänden

Neben dem wasserdurchlässigen Material der **Delta-Dry® Polsterwatte** sorgt vor allem das patentierte atmungsaktive Strickgewebe für einen schnellen Abtransport von eindringendem Wasser und eine schnelle Trocknung der Polsterwatte. Dadurch werden Hautmazerationen, Juckreiz und Gerüche erheblich reduziert. Eine einseitige Haftbeschichtung erleichtert die Anlage und verhindert das Verrutschen der Binde während der Verbandanlage.

**Material:** 80 % Polypropylen, 18 % Nylon, 2 % Polyester und einem Acrylatkleber

### Vorteile auf einen Blick

- Hoher Hygienestandard
- Waschbares Gewebematerial
- Schnelle Materialtrocknung
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Besonders anpassungsfähig
- Hautverträglich
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden
- Nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen, Verstauchungen
- Synthetische Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



| Delta-Dry® Polsterwatte |                 |               |          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.               | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7344300                 | 5,0 cm x 2,4 m  | 1/6*          | 00593336 |
| 7344301                 | 7,5 cm x 2,4 m  | 1/6*          | 00613180 |
| 7344302                 | 10,0 cm x 2,4 m | 1/6*          | 00615492 |

\*Inhalt einer Verpackung: 12 Binden

# Delta Terry-Net™ S

## Der synthetische Frotteeschlauch auch mit Daumeneinschluss

Delta Terry-Net™ S ist ein synthetischer Frottee-schlauch, der gleichzeitig polstert und die Haut so vor den Einwirkungen des harten Castmaterials schützt. Das bauschige Material schont die Haut bei lang andauernden Behandlungen.

**Material:** 95 % Polyester, 3 % Nylon, 2 % Spandex

### Vorteile auf einen Blick

- Hautfreundlich
- Hoher Tragekomfort
- Schneller Abtransport der Feuchtigkeit nach außen
- Schnelle Applikation
- Mit Daumeneinschluss erhältlich
- Optimale Passform
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von synth. Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzugsmaterial für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Delta Terry-Net™ C

## Der Frotteeschlauch aus Baumwolle

Dank seines hochwertigen und elastischen Baumwoll-materials sorgt Delta Terry-Net™ C für einen hohen Tragekomfort und eine optimale Passform. Der Frotteeschlauch überzeugt durch sein hautfreundliches Baumwollmaterial.

**Material:** 100 % Baumwolle

### Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Material
- Hautverträglich
- Hoher Tragekomfort
- Schnelle Anwendung
- Faltenfreie Anlage
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von synth. Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzugsmaterial für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta Terry-Net™ S |                  |               |          |
|--------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.          | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7230600            | 5,0 cm x 13,5 m  | 1/2           | 00855813 |
| 7230601            | 7,5 cm x 13,5 m  | 1/2           | 00855919 |
| 7230602            | 10,0 cm x 13,5 m | 1/2           | 00855925 |
| 7230603            | 12,5 cm x 13,5 m | 1/1           | 00855954 |
| 7230604            | 15,0 cm x 13,5 m | 1/1           | 00855960 |

| Delta Terry-Net™ S, mit Daumeneinschluss |                  |               |          |
|------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7230800                                  | 7,5 cm x 38,0 cm | 10/180        | 02176157 |
| 7230801                                  | 7,5 cm x 46,0 cm | 10/180        | 02176387 |
| 7230802                                  | 5,0 cm x 38,0 cm | 10/180        | 02176111 |
| 7230803                                  | 5,0 cm x 46,0 cm | 10/180        | 02176134 |

| Delta Terry-Net™ C |                  |               |          |
|--------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.          | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7230500            | 5,0 cm x 13,5 m  | 1/2           | 00855428 |
| 7230501            | 7,5 cm x 13,5 m  | 1/2           | 00855434 |
| 7230502            | 10,0 cm x 13,5 m | 1/2           | 00855440 |
| 7230503            | 12,5 cm x 13,5 m | 1/1           | 00855799 |
| 7230504            | 15,0 cm x 13,5 m | 1/1           | 00855807 |

# Tricofix®

## Der elastische Baumwollschlauchverband

Ein Schlauchverband muss nicht nur besonders hautfreundlich sein, sondern auch an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden können, ohne dass dabei Laufmaschen entstehen. **Tricofix®** hat sich gerade hier seit Jahren bewährt. Er lässt sich dehnen und verjüngt sich durch Strecken wieder.

**Material:** 100 % Baumwolle

### Vorteile auf einen Blick

- Nahtlos gewirkt
- Hautverträglich
- Besonders elastisch
- Hohe Flexibilität des Materiales passt sich jeder Körperregion an
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Verband- und Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden
- Unter klebenden und entlastenden Verbänden
- Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Delta-Net® Stockinette

## Der synthetische Trikotschlauchverband

**Delta-Net® Stockinette** ist ein synthetischer Trikot-schlauchverband, der die Haut vor den Einwirkungen des Castmaterials schützt. Er ermöglicht ein anatomisch passgenaues, hautnahes Anlegen des Cast-Verbandes, ohne dass eine zusätzliche Polsterung bei der Behandlung notwendig wird. **Delta-Net® Stockinette** ist besonders geeignet für den Hautschutz unter semi-rigiden Stützverbänden wie Delta-Cast® Soft und ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.

**Material:** 100 % Polyester

### Vorteile auf einen Blick

- Sehr anpassungsfähig
- Elastisch
- Hautverträglich
- Feuchtigkeitsabweisend
- Einfache und schnelle Anwendung
- Hoher Tragekomfort
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Hautschutz unter semi-rigiden Stützverbänden
- Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden
- Verbandschutz
- Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Tricofix® Trikotschlauchverband, weiß, gerollt, im Spenderkarton |                  |               |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                        | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| <b>A/1: Finger und Zehen</b>                                     |                  |               |          |
| 0219100                                                          | 1,5 cm x 20,0 m  | 1/22          | 01868930 |
| <b>B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger</b>                  |                  |               |          |
| 0219200                                                          | 2,5 cm x 20,0 m  | 1/15          | 01868947 |
| <b>C/3: Hände und Kinderarme</b>                                 |                  |               |          |
| 0219300                                                          | 4,0 cm x 20,0 m  | 1/9           | 01868953 |
| <b>D/5: Hände, Arme, Füße und Unterschenkel Erwachsener</b>      |                  |               |          |
| 0219500                                                          | 6,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 01868976 |
| <b>E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe</b>                        |                  |               |          |
| 0219700                                                          | 8,0 cm x 20,0 m  | 1/20          | 01868982 |
| <b>F/7: Oberschenkel und große Köpfe</b>                         |                  |               |          |
| 0219800                                                          | 10,0 cm x 20,0 m | 1/16          | 01868999 |

| Tricofix® Trikotschlauchverband, weiß, gerollt, im Spenderkarton |                  |               |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                        | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| <b>G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe</b>                 |                  |               |          |
| 0219900                                                          | 12,0 cm x 20,0 m | 1/6           | 02059606 |
| <b>K: kleine Rümpfe</b>                                          |                  |               |          |
| 0220100                                                          | 16,0 cm x 10,0 m | 1/18          | 01869007 |
| <b>L: große Rümpfe wie Mamma-, Hüft- und Höschenverband</b>      |                  |               |          |
| 0220200                                                          | 21,0 cm x 10,0 m | 1/12          | 01869013 |

| Delta-Net™ Stockinette |         |                  |               |          |
|------------------------|---------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.              | Farbe   | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7230705                | weiß    | 2,5 cm x 22,8 m  | 1/2           | 15238813 |
| 7230700                | weiß    | 5,0 cm x 22,8 m  | 1/2           | 00855380 |
| 7230701                | weiß    | 7,5 cm x 22,8 m  | 1/2           | 00855397 |
| 7230702                | weiß    | 10,0 cm x 22,8 m | 1/2           | 00855405 |
| 7230703                | weiß    | 15,0 cm x 22,8 m | 1/1           | 00855411 |
| 7272300                | schwarz | 2,5 cm x 22,8 m  | 1/2           | 16127412 |
| 7272301                | schwarz | 5,0 cm x 22,8 m  | 1/2           | 16127429 |
| 7272302                | schwarz | 7,5 cm x 22,8 m  | 1/2           | 16127435 |
| 7272303                | schwarz | 10,0 cm x 22,8 m | 1/2           | 16127441 |
| 7272304                | schwarz | 15,0 cm x 22,8 m | 1/1           | 16127458 |

# Artiflex®, Artiflex® Soft, Artiflex® Natur

## Die hochgebauchte Polsterbinde zur Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden

Durch ihr bauschiges Material schützen Polsterbinden exponierte Stellen vor eventuellen Druckstellen, verursacht durch Gips- oder Castmaterial. Ob aus synthetischen Fasern oder aus Naturfasern – das Sortiment von **Artiflex®** bietet individuelle Lösungen je nach Behandlungsmethode.

**Material:** **Artiflex®** und **Artiflex® Soft** bestehen aus 100 % synthetischen Fasern. **Artiflex® Natur** besteht aus 100 % Naturfasern.

### Vorteile auf einen Blick

- Luftdurchlässig
- Hautverträglich
- Anschmiegsam
- Weiche Oberflächenstruktur
- Faltenfreier Sitz
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen
- Unterpolsterung von lymphologischen und phlebologischen Verbänden

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



# Delta-Rol® S

## Die synthetische Polsterwattebinde mit integriertem Polyurethantape

**Delta-Rol® S** ist eine Polsterwattebinde, die eine Kombination aus weichen Polyesterfasern und einer dünnen Schicht Polyurethanschaum bietet. Diese Beschaffenheit stellt eine Zeit- und Kostenersparnis gegenüber anderen Therapien dar, da zwei Produkte in einem integriert sind.

**Material:** Polyesterfasern und Polyurethanschaum

### Vorteile auf einen Blick

- Polsterwirkung ohne Kantenbildung
- Autoklavierbar
- Integriertes Polyurethantape
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



| Artiflex®, Einzelbinde lose im Karton      |                 |               |          |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                  | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0904400                                    | 6,0 cm x 3,0 m  | 50/50         | 07154350 |
| 0904600                                    | 10,0 cm x 3,0 m | 30/30         | 07154367 |
| 0904700                                    | 15,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154373 |
| 0904800                                    | 20,0 cm x 3,0 m | 15/15         | 07154396 |
| Artiflex® Soft, Einzelbinde lose im Karton |                 |               |          |
| 7286000                                    | 6,0 cm x 3,0 m  | 50/50         | 07154427 |
| 7286100                                    | 8,0 cm x 3,0 m  | 40/40         | 00196049 |
| 7286200                                    | 10,0 cm x 3,0 m | 30/30         | 07154433 |
| 7286300                                    | 15,0 cm x 3,0 m | 20/20         | 07154456 |
| 7286400                                    | 20,0 cm x 3,0 m | 15/15         | 07154462 |

| Artiflex® Natur, Einzelbinde lose im Karton |                 |               |          |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7287000                                     | 5,0 cm x 2,7 m  | 70/70         | 00196173 |
| 7287100                                     | 7,5 cm x 2,7 m  | 50/50         | 00196210 |
| 7287200                                     | 10,0 cm x 2,7 m | 30/30         | 00196345 |
| 7287300                                     | 15,0 cm x 2,7 m | 20/20         | 00196546 |
| 7287400                                     | 20,0 cm x 2,7 m | 15/15         | 00196552 |

| Delta-Rol® S |                  |               |          |
|--------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.    | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7232200      | 5,0 cm x 2,75 m  | 12/120        | 08654238 |
| 7232201      | 7,5 cm x 2,75 m  | 12/144        | 08654250 |
| 7232202      | 10,0 cm x 2,75 m | 12/108        | 08654273 |
| 7232203      | 15,0 cm x 2,75 m | 12/72         | 08654304 |

# Delta-Rol®

## Die synthetische Polsterwattebinde

Delta-Rol® besteht aus Polyesterfasern und bietet als Polsterwattebinde optimale Polstereigenschaften, um die Haut bei einer oft über mehrere Wochen andauernden Behandlung zu schützen.

**Material:** 100 % Polyesterfasern

**Vorteile auf einen Blick**

- Polsterwirkung
- Autoklavierbar
- Glatte Oberfläche
- Latexfrei

**Anwendungsgebiete**

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Specialist®

## Polsterwattebinde mit hohem Baumwollanteil

Specialist® wird aus besonders hautfreundlichem Material hergestellt und ist dadurch vor allem für den Einsatz zur Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden geeignet.

**Material:** 50% Baumwolle, 50% Viskose

**Vorteile auf einen Blick**

- Hautverträglich
- Leicht abreißbar
- Gut haftender Lagenverbund
- Latexfrei

**Anwendungsgebiete**

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta-Rol® |                  |               |          |
|------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.  | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7231000    | 5,0 cm x 2,75 m  | 12/120        | 02743426 |
| 7231001    | 7,5 cm x 2,75 m  | 12/288        | 02743432 |
| 7231002    | 10,0 cm x 2,75 m | 12/216        | 02743449 |
| 7231003    | 15,0 cm x 2,75 m | 12/144        | 02743455 |

| Specialist® |                 |               |          |
|-------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.   | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7230400     | 5,0 cm x 3,6 m  | 24/144        | 02268801 |
| 7230401     | 7,5 cm x 3,6 m  | 12/72         | 02268824 |
| 7230402     | 10,0 cm x 3,6 m | 12/72         | 02268847 |
| 7230403     | 15,0 cm x 3,6 m | 6/36          | 02268876 |

# Tensoban®

## Die Polsterschaumbinde aus Polyurethanschaum

Die Polsterschaumbinde **Tensoban®** sorgt für eine Vorkomprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden. Die Vorkomprimierung dient dazu, dass zwischen Verband und Extremität nicht zu viel Spielraum entsteht.

**Material:** 100 % Polyurethanschaum

### Vorteile auf einen Blick

- Luftdurchlässig
- Weiche Oberflächenstruktur
- Feuchtigkeitsabweisend
- Temperatenausgleichend
- Schnelle und einfache Anwendung
- Selbsthaftende Eigenschaft minimiert Verrutschen
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen bei Starr- und Stützverbänden

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Tensoban® |                 |               |          |
|-----------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr. | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7150008   | 7,0 cm x 20,0 m | 12/108        | 03918336 |

# Krepppapierbinde

## Zuverlässige Vorfixierung

Damit zwischen Verband und Extremität nicht zu viel Spielraum ist, kann Polstermaterial unter Starr- und Stützverbänden vorkomprimiert werden. Sonst wäre die Ruhigstellung gefährdet. Die Krepppapierbinde dient dieser initialen Vorfixierung des Stützverbandes. Sie sorgt für eine glatte Oberfläche des Polstermaterials, was das Anlegen des Cast-Verbandes erleichtert. Die Binde ist reißbar und auch an stark konturierten Körperteilen anwendbar.

**Material:** 100 % Zellulose

### Vorteile auf einen Blick

- Gute Lagenhaftung
- Gute Komprimierung des Polstermaterials
- Einfache Applikation
- Verhindert Eindringen von gipshaltigem Wasser in das Polstermaterial
- Sägeschutz bei der Gipsabnahme

### Anwendungsgebiete

- Vorkomprimierung des Polstermaterials von Starr- und Stützverbänden
- Vorfixierung der Extremitäten

**Anwendungsdauer:**  
Bis zu mehreren Wochen



**LATEX** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

| Krepppapierbinde, Einzelbinde lose im Karton |                 |               |          |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                    | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 0179000                                      | 4,0 cm x 4,0 m  | 50/200        | 03202543 |
| 0179100                                      | 6,0 cm x 4,0 m  | 20/200        | 03944641 |
| 0179200                                      | 8,0 cm x 4,0 m  | 20/200        | 03944658 |
| 0179300                                      | 10,0 cm x 4,0 m | 20/200        | 03944664 |
| 0179400                                      | 12,0 cm x 4,0 m | 20/200        | 03944670 |

# Gehhilfen und Zubehör

**Gehhilfen** ermöglichen eine Fortbewegung mit Starr- und Stützverbänden an den unteren Extremitäten und vermitteln dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit. Sie sollen das Laufen mit einem Verband unterstützen und den Abrollvorgang so natürlich wie möglich gestalten. Dabei sind sie leicht, sicher fixierbar und rutschfest.

Das innovative und umfassende **Zubehör** bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine Cast-Verbände noch besser zu gestalten. Dadurch wird eine individuelle Patientenversorgung mit hohem Komfort gewährleistet. Diese Anforderungen erfüllt zum Beispiel die kohäsive Fixierbinde **Elastomull® haft / color**. Dank ihrer speziellen Eigenschaften ist sie für das Fixieren von Cast-Schienen besonders geeignet.


# Produktübersicht

## Gehhilfen

Artistep® S S. 52

## Zubehör

- Delta Terry-Net™ Filzpolster S. 53
- Delta Terry-Net™ Schaumpolster S. 54
- Delta Terry-Net™ Randpolster S. 55
- Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System S. 56
- Elastomull® haft/Elastomull® haft color S. 57

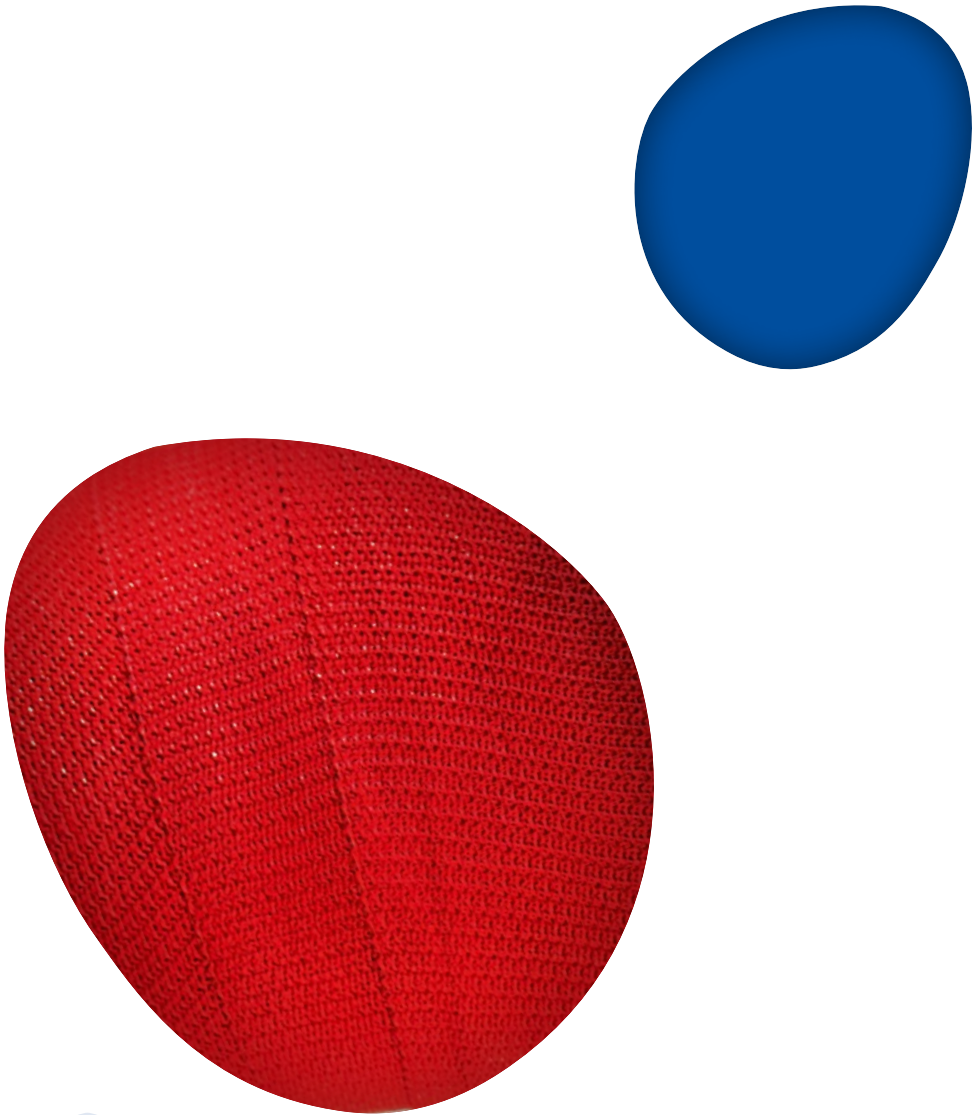

# Artistep® S

## Die Gehsohle mit rutschfestem Spezialprofil für den Cast- und Gipsverband

**Artistep® S** ist eine Gehsohle für Starr- und Stützverbände, die wesentlich dazu beiträgt, das Sicherheitsgefühl von Patienten zu erhöhen. **Artistep® S** ist in sechs Größen erhältlich und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

**Material:** Nylon, Polyethylen, PVC, thermoplastisches Gummi

### Vorteile auf einen Blick

- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Passform
- Rutschfest
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Stabile Klettbänder für sichere Fixierung
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Gehhilfe für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelverband
- Für synthetische Cast- sowie Naturgips-Verbände

### Anwendungsdauer:

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Delta Terry-Net™ Filzpolster

## Selbstklebendes Filzpolster

Das **Delta Terry-Net™** selbstklebende Filzpolster eignet sich ideal zur Polsterung von Schienen und zur punktuellen Polsterung exponierter Stellen. Das Polster ist vollflächig klebend. Durch die hohe Klebewirkung ist eine optimale Fixierung gewährleistet.

**Material:** 100% Polyester

### Vorteile auf einen Blick


- Klebt vollflächig
- Faltenfreies Anlegen
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Polsterung von Schienen
- Punktuelle Polsterung exponierter Stellen

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen

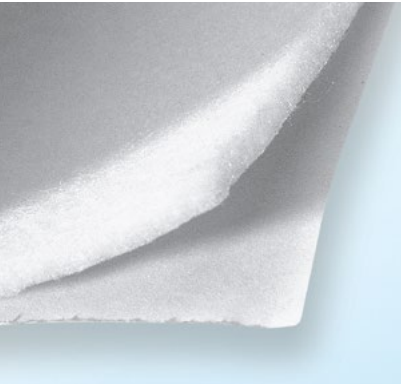

**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Artistep® S |                    |               |          |
|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.   | Abmessung          | Verp.-Einheit | PZN      |
| 4556400     | Größe P (25 – 30)  | 1/10          | 00948905 |
| 4556500     | Größe XS (31 – 34) | 1/10          | 00948911 |
| 4556600     | Größe S (35 – 38)  | 1/10          | 00948928 |
| 4556700     | Größe M (39 – 41)  | 1/10          | 00948934 |
| 4556800     | Größe L (42 – 43)  | 1/10          | 00948940 |
| 4556900     | Größe XL (44 – 47) | 1/10          | 00948957 |

| Delta Terry-Net™ Filzpolster |                 |               |          |
|------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                    | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7229505                      | 58,0 cm x 1,0 m | 1/1           | 02177205 |

[Zurück zur Sortimentsübersicht](#)

# Delta Terry-Net™ Schaumpolster

## Selbstklebendes Schaumpolster

Das **Delta Terry-Net™** selbstklebende Schaumpolster eignet sich ideal zur Polsterung von Schienen und zur punktuellen Polsterung exponierter Stellen. Das Polster ist vollflächig klebend. Durch die hohe Klebewirkung ist eine optimale Fixierung gewährleistet.

**Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

### Vorteile auf einen Blick

- Vollflächig klebend
- Mit Frottee beschichtet
- Faltenfreies Anlegen
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Polsterung von Schienen
- Punktuelle Polsterung exponierter Stellen

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

# Delta Terry-Net™ Randpolster

## Das selbstklebende Randpolster

Das **Delta Terry-Net™ Randpolster** ist ein selbstklebendes, stark haftendes Vliespolster zum Abpolstern von harten Kanten. Das Material kann unter leichtem Zug optimal anmodelliert werden. Das **Delta Terry-Net™ Randpolster** ist in Weiß und in Blau erhältlich.

**Material:** 100 % Baumwolle

### Vorteile auf einen Blick

- Vollflächig klebend
- Optimal anmodellierbar
- Leicht zu fixieren
- Starke Klebkraft für sicheren Halt
- Hoher Tragekomfort
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Abpolsterung harter Kanten bei Cast-Verbänden

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta Terry-Net™ Schaumpolster |                 |               |          |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                      | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7229506                        | 58,0 cm x 1,0 m | 1/1           | 02177085 |

| Delta Terry-Net™ Randpolster |           |                 |               |          |
|------------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                    | Abmessung | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7229507                      | weiß      | 3,2 cm x 13,5 m | 1/52          | 02176631 |
| 7229508                      | blau      | 3,2 cm x 13,5 m | 1/52          | 01416955 |
| 7229510                      | blau      | 8,0 cm x 13,5 m | 1/14          | 09205850 |

[Zurück zur Sortimentsübersicht](#)

# Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System

## Das selbstklebende Klettverschluss-System

Das **Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System** erleichtert die Anlage von FCT-Schienen und Braceverbänden. Es besteht aus einem selbstklebenden Haftband und einem elastischen Flauschband und ist in zwei Breiten erhältlich.

**Material:** Nylon, Farbstoffe, Silikon, Fixiermittel, Harze

### Vorteile auf einen Blick

- Einfache Anwendung
- Sichere Fixierung
- Starke Klebkraft für einen sicheren Halt
- Latexfrei

### Anwendungsgebiete

- Sorgt für optimale Anlage von funktionellen Cast- und Braceverbänden

### Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System, Haftband |                |               |          |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                         | Abmessung      | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7229500                                           | 2,5 cm x 9,0 m | 1/20          | 02582041 |
| 7229502                                           | 5,0 cm x 9,0 m | 1/20          | 00795525 |

| Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System, elastisches Flauschband |                 |               |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.                                                        | Abmessung       | Verp.-Einheit | PZN      |
| 7229501                                                          | 2,5 cm x 13,5 m | 1/20          | 02582006 |
| 7229503                                                          | 5,0 cm x 13,5 m | 1/20          | 00795531 |

# Elastomull® haft/color

## Die auf sich selbst haftende, elastische, latexfreie Fixierbinde

**Elastomull® haft / color** eignet sich besonders zum Fixieren von Castschienen. Durch die besondere Beschichtung haften die einzelnen Wickellagen sehr sicher aufeinander, was ein Verrutschen der Fixierbinde verhindert.

**Material:** 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid

### Vorteile auf einen Blick

- Kein Verrutschen der Binde beim Fixieren von Castschienen
- Faltenfreier Sitz
- Materialsparende Applikation
- Anhaltende ausgezeichnete Elastizität

### Anwendungsgebiete

- Zur Fixierung von Castschienen und Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Als leichter Stützverband nach Gips- oder Tapeabnahme

### Anwendungsdauer:


Bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Elastomull® haft |                  |               |          |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.        | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 4547500          | 4,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 02507080 |
| 4547600          | 6,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 02507097 |
| 4547700          | 8,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 02507105 |
| 4547800          | 10,0 cm x 20,0 m | 1/24          | 02507111 |
| 4547900          | 12,0 cm x 20,0 m | 1/24          | 02507128 |
| 4724600          | 6,0 cm x 20,0 m  | 6/24          | 06618451 |
| 4724900          | 8,0 cm x 20,0 m  | 6/24          | 06618468 |
| 4730300          | 10,0 cm x 20,0 m | 6/24          | 06618474 |

| Elastomull® haft color |       |                  |               |          |
|------------------------|-------|------------------|---------------|----------|
| Best.-Nr.              | Farbe | Abmessung        | Verp.-Einheit | PZN      |
| 4537100                | blau  | 6,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 01412549 |
| 4537200                | blau  | 8,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 01412555 |
| 4537300                | blau  | 10,0 cm x 20,0 m | 1/24          | 01412561 |
| 4537400                | rot   | 6,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 01412578 |
| 4537500                | rot   | 8,0 cm x 20,0 m  | 1/24          | 01412584 |
| 4537600                | rot   | 10,0 cm x 20,0 m | 1/24          | 01412590 |

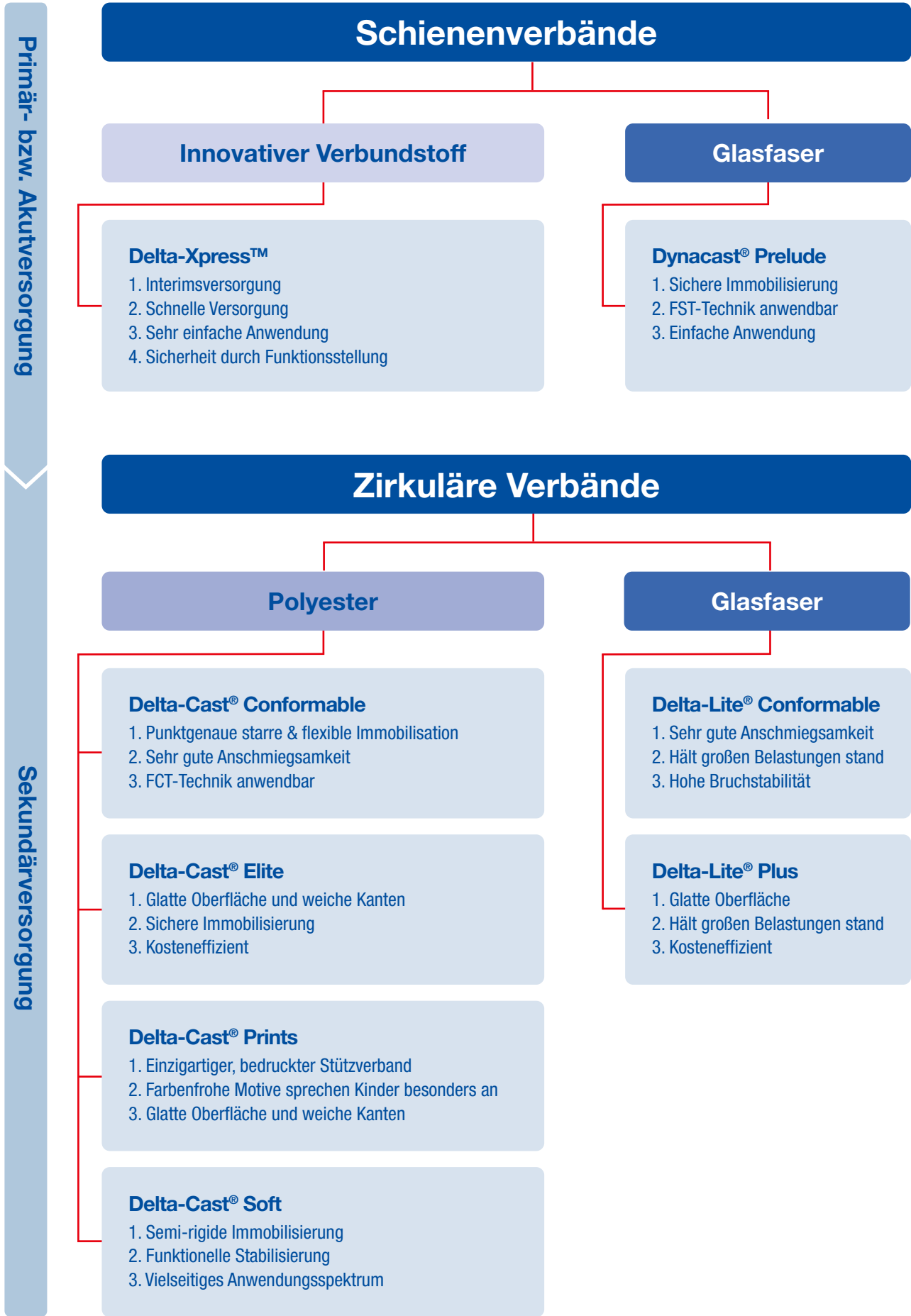

# Delta-Cast® – we know casting.

## Effektive Therapien erfordern ein umfassendes Know-how – für Ihre Frakturversorgung alles aus einer Hand!

Die Behandlung von Frakturen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten im Klinik- und Praxisalltag. **Delta-Cast®** ist Ihr Partner für den Alltag im Cast-Raum. Wir unterstützen Sie im Klinik- und Praxisalltag bei der Anlage von Starr- und Stützverbänden für eine professionelle Frakturversorgung.

**Delta-Cast®** ist stolz darauf, seine Kunden durch Service und Schulungen mit umfassendem Wissen zu unterstützen und mit Tipps & Tricks bei den Herausforderungen des Alltags im Cast-Raum zur Seite zu stehen. Im Folgenden finden Sie unsere Serviceleistungen und Trainingsangebote – von Online Schulungen bis zu individuellen Fortbildungen.

## Serviceleistungen

Unsere Serviceleistungen umfassen hochwertige Produkte, eine individuelle Unterstützung sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.



**Unser Angebot**



**Ihr Mehrwert**



Hochwertige Produkte



Qualifizierter kaufmännischer und fachlicher Außendienst



Professionelle und hochwertige (Online-) Fortbildungen durch unsere Medical Advisor Orthopaedics



Delta-Cast® YouTube-Kanal mit Applikationsvideos und Tutorials mit Tipps & Tricks für den Alltag im Cast-Raum



Anwendungsbroschüren für Cast- und Schienenverbände

Therapiesicherheit und maximaler Komfort für Ihre Patienten

Kompetenter Service und aktive Unterstützung im Klinik- und Praxisalltag

Fachliche Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, Wissensvertiefung, Anwendungssicherheit

Online-Wissen zur Frakturversorgung 24/7 für Ihre Mitarbeiter verfügbar

Hilfestellung bei der korrekten Anlage von Stützverbänden



Mehr erfahren:  
Serviceleistungen



[Delta-Cast.de > Serviceleistungen](#)

## Trainingsangebote

Wir sind stolz darauf, Schulungen, Fortbildungen, Web-Seminare und Medien zur Unterstützung Ihres Alltags im Cast-Raum anbieten zu können.

Unsere Immobilisationsschulungen bieten Ihnen Antworten auf Ihre Herausforderungen im Klinik- und Praxisalltag.

|                                                     | Delta-Cast YouTube Kanal |                             | Delta-Cast Web-Seminare |                           | Delta-Cast Fortbildungen       |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                     | YouTube Tutorials        | YouTube Applikations-videos | Zentrale Web-Seminare   | Individuelle Web-Seminare | Inhouse Schulung / Fortbildung | Wochenend- oder Tagesfortbildung extern |
| festgelegtes Thema                                  | ✓                        | ✓                           | ✓                       | --                        | --                             | ✓                                       |
| kundenindividuelles Thema                           | --                       | --                          | --                      | ✓                         | ✓                              | (--)                                    |
| live zu einem festgelegten Zeitpunkt                | --                       | --                          | ✓                       | ✓                         | ✓                              | ✓                                       |
| 24/7 verfügbar                                      | ✓                        | ✓                           | --                      | --                        | --                             | --                                      |
| Interaktion/Fragen stellen möglich                  | --                       | --                          | ✓                       | ✓                         | ✓                              | ✓                                       |
| Anwender kann selber praktisch üben unter Anleitung | --                       | --                          | --                      | --                        | ✓                              | ✓                                       |
| Anwendung wird von A-Z gezeigt                      | (--)                     | ✓                           | ✓                       | ✓                         | ✓                              | ✓                                       |
| online                                              | ✓                        | ✓                           | ✓                       | ✓                         | --                             | --                                      |
| offline                                             | --                       | --                          | --                      | --                        | ✓                              | ✓                                       |

Wir bieten ein vielfältiges Fortbildungsprogramm direkt vor Ort an. Unsere erfahrenen Anwendungsberater zeigen hilfreiche Techniken für unsere Cast- und Schienenverbände und leisten Unterstützung beim Üben mit den Materialien. Für Details und Termine stimmen Sie sich gern mit Ihrem zuständigen Außendienst ab oder senden uns eine Kontaktanfrage. Nutzen Sie hierfür gerne unser [Delta-Cast Kontaktformular](#).

Zum Delta-Cast® Kontaktformular:



[Delta-Cast.de > Kontakt & Informationsmöglichkeit](#)

## Unser Fortbildungsangebot auf Campus

Unsere Web-Seminare sind die optimale Ergänzung zur Fortbildung vor Ort. Praxisnah widmen wir uns vielfältigen Themen aus dem Alltag im Cast-Raum. Das Beste ist, Sie können uns ortsunabhängig erreichen und brauchen nur eine Internetverbindung. Informieren Sie sich hier über die aktuellen Termine.

Zum Delta-Cast® Sendeplan auf Campus:



[campus.hm.essity.com > Online #Delta-Cast](#)



Mehr erfahren:  
Trainingsangebote



[Delta-Cast.de > Trainingsangebote](#)

# Applikationsvideos & Tutorials

Online-Wissen zur Frakturversorgung: Auf dem **Delta-Cast®** YouTube-Kanal finden Sie anschauliche Trainingsvideos für Ihren Alltag im Cast-Raum. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Lehrvideoangebot bestmöglich in Ihrem Alltag im

Cast-Raum unterstützen. Besuchen Sie uns auf unserem Videokanal und folgen Sie dazu einfach dem QR-Code oder geben Sie bei YouTube „Delta-Cast“ in das Suchfenster ein.

**Zum Delta-Cast® YouTube Kanal:**



[youtube.com > Delta-Cast](https://youtube.com/Delta-Cast)

## Delta-Cast® Tutorials – Tipps & Tricks für den Alltag im Cast-Raum

Die **Delta-Cast®** Tutorials bieten Online-Wissen zur Frakturversorgung, um Ihren Alltag im Cast-Raum zu erleichtern.


- Ihre Herausforderungen – unsere Lösungen.
- Entdecken Sie wertvolle Tipps & Tricks und praktische Verarbeitungshinweise.
- Aus der Praxis für die Praxis – lassen Sie sich von unseren Tutorials unterstützen.



**Zu den Delta-Cast® YouTube Tutorials:**



[youtube.com > Delta-Cast > Delta-Cast Tutorials](https://youtube.com/Delta-Cast)

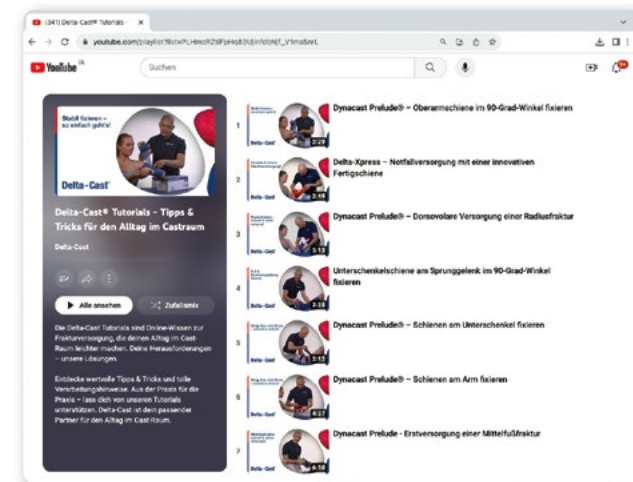

**Mehr erfahren:  
Applikationsvideos & Tutorials**



[Delta-Cast.de > Applikationsvideos & Tutorials](https://Delta-Cast.de)

## Weitere Schulungsmaterialien

Zusätzlich bieten wir Ihnen unterschiedliche Schulungsmaterialien an, die sich durch intensive Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal exakt am Bedarf von Anwendern orientieren. So werden Sie in Ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt.



Frakturposter und Poster zur Anlegetechnik für die orthopädische Praxis und die Notaufnahme



Anwendungsbroschüren für Cast- und Schienenverbände



Patienteninformationsblöcke




Wickelanleitungen und Arbeitsanweisungen

Wenn Sie sich für spezielle Fortbildungen oder Schulungsmaterialien interessieren, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ihr zuständiger Außendienst hilft Ihnen gerne weiter.

## Kontakt & Informationsmöglichkeit


Sie haben Anfragen oder Anregungen? Sie wünschen Informationsmaterial oder einen Außendienstbesuch direkt vor Ort? Kontaktieren Sie uns.

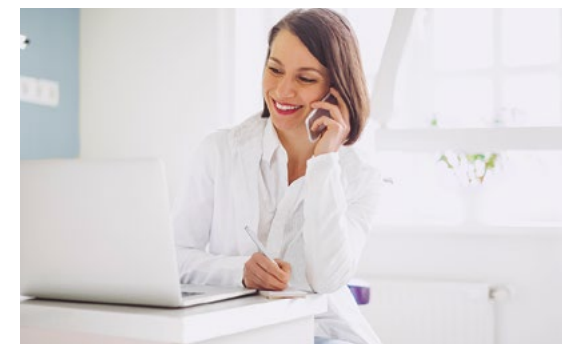

**Mehr erfahren:  
Kontakt & Informationsmöglichkeit**





[Delta-Cast.de > Kontakt & Informationsmöglichkeit](https://Delta-Cast.de)

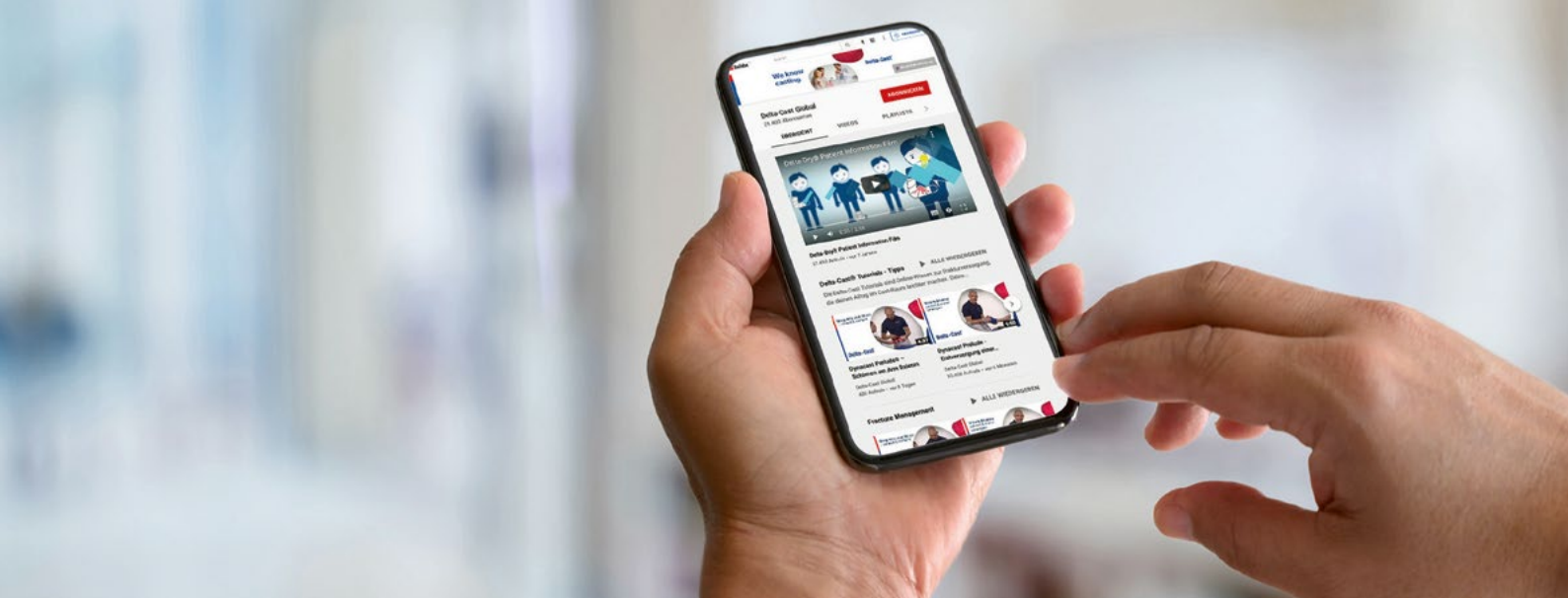

# Im Cast-Raum geschult!

Für **Online-Wissen** zur Frakturversorgung besuchen Sie uns im Internet auf [www.Delta-Cast.de](http://www.Delta-Cast.de) und unseren **Social Media-Seiten**. Werden Sie Teil der **Delta-Cast®** Community! Wir freuen uns auf den Austausch.

Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube und LinkedIn, um über Produkte informiert zu werden, hilfreiche Tutorials abzurufen, Neuerungen zu erfahren oder an Veranstaltungen teilzunehmen.

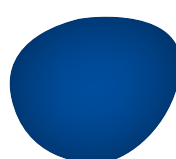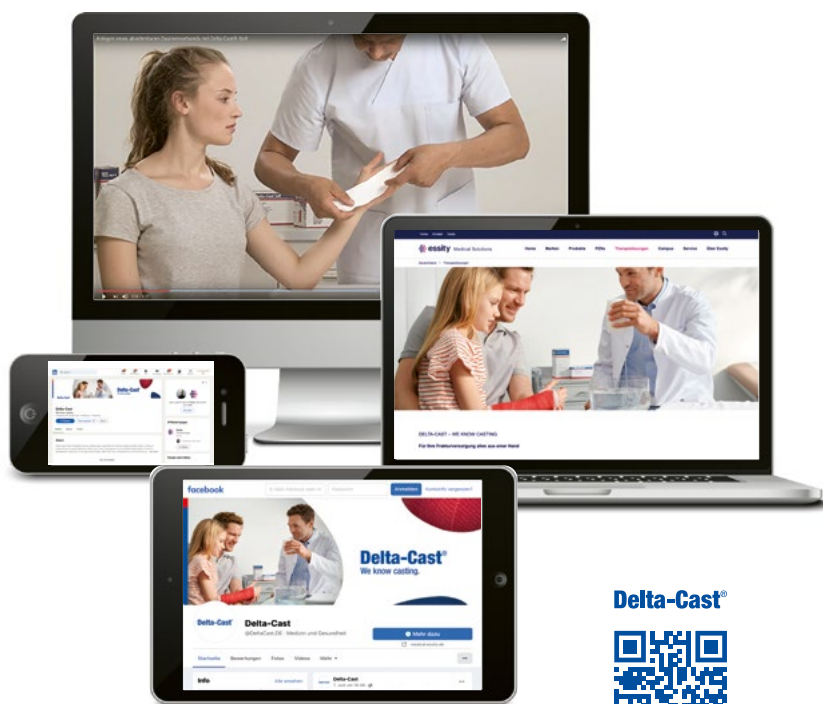

**Delta-Cast®**



Delta-Cast  
Homepage



Delta-Cast  
YouTube-Kanal



Delta-Cast  
Facebook

**LinkedIn**



Delta-Cast  
LinkedIn



Delta-Cast®  
an Essity brand

**BSN medical GmbH**  
an Essity company  
Schützenstraße 1-3  
22761 Hamburg  
www.medical.essity.de  
Telefon +49 800/3000789  
Fax +49 800/850 1021

**Essity Austria GmbH**  
Storchengasse 1  
1150 Wien  
Österreich  
Telefon +43 (0)1 89901-724  
Fax +43 (0)1 89901-551

**Essity Switzerland AG**  
Parkstrasse 1b  
6214 Schenkon  
Schweiz  
Telefon +41 (0)848 810 150  
Fax +41 (0)800 810 150

